

セラジルシャインポイント

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

研削用：



ディスクタイプ

研磨用：



#28L



#20



#11

2. 構造

作業部（ヘッド）：

ダイヤモンド粒子を合成ゴムで結合したもの

軸部（シャンク）：

ステンレス鋼

3. 原理：

本製品は、歯科技工用電動駆動装置の軸部に装着し、回転させることにより、研削または研磨を行う工具である。

【使用目的又は効果】

本製品は、ゴム基材にダイヤモンド粒子を結合させたポイント状、ホイール状、ディスク状の形態を持つ研磨材で、歯科補綴物の研削、研磨に用いる。

【性能及び安全性に関する規格】

形態番号	寸法（Φ×L）mm
ディスクタイプ	26×3
#28L	4×12
#20	4×12
#11	12×2

【使用方法等】

[使用方法]

- 1 本製品を歯科用電気駆動装置に確実に装着し、半チャックでないことを確認してください。
2. 試運転を行い、製品に振れや異常振動がないことを確認後、補綴物の研削、研磨を行ってください。

規格及び許容回転速度は表のとおり

形態番号	許容回転速度（rpm）
ディスクタイプ	15000-25000/min
#28L	15000-25000/min
#20	15000-25000/min
#11	15000-25000/min

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・歯科用電気駆動装置の取り扱い説明書に従い、本製品を確実にチャックの奥まで装着したことを確認してから使用してください。
- ・使用前、必ず試運転を行い、振れがないことを確認してください。
- ・本製品作業部の形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けてください。
- ・本製品を再使用前は、必ず製品状態を確認してください。

【使用上の注意】

- ・許容回転速度を超えて使用しないでください。
- ・本製品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないでください。
- ・本製品の形態変更や改造はしないでください。
- ・使用前および使用後には必ず製品の状態を確認してください。破損、ひび割れ、作業部および軸部にキズ、曲がり、汚染、腐食などがある製品は使用しないでください。
- ・本製品は再使用可能器具です。再使用の可否は作業部の摩耗状態により判断してください。
- ・研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化する場合があります。過度な加圧や高回転での連続使用は避けてください。
- ・本製品を使用する際、局部集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクや保護メガネなどの個人防護具を使用してください。
- ・本製品は高速回転で使用されるため、使用中に破損する可能性があります。十分に注意して取り扱ってください。
- ・作業中に異常音や激しい振動が発生した場合、または破損疑いの疑いがある場合は、直ちに作業を中止してください。
- ・本製品は、歯科医療関係者以外は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間】

- ・粉塵や化学薬品を避け、清潔な場所に保管してください。
- ・湿気が多い環境を避け、外部からの圧力や汚染を受けないように保管してください。
- ・本製品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売元：藤原歯科貴金属株式会社

大阪府大阪市天王寺区餌差町 8-2

TEL 06-6761-2680

・製造元：Shanghai New Century Dental Materials Co., Ltd

・製造国：中華人民共和国