

歯科材料 09 歯科用研削材
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

ピー・ピー グラインダー

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・無理な角度や過度の加圧はしないこと。


【形状、構造及び原理】

【概要】

：歯科技工用アブレイブ研削器具
本品は、ナイロン不織布に砥粒を含浸させ、何枚も積層しホイール状に加工したものである。
本品は、歯科用レーズエンジンの装着して使用する。

【形状、構造】

：本品は、ホイール状に加工された歯科技工用アブレイブ研削器具である。
本品は、歯科用レーズエンジンの装着して使用する。

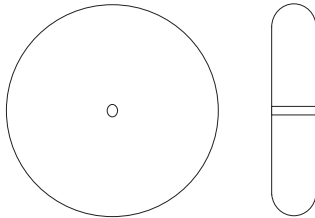

75mm×18mm

【原理】

：砥粒による研削。

【原材料又は構成部品】

名称	原材料名	血液・体液等の接触の有無
ホイール 75mm×18mm	基材 : ナイロン不織布	無
	研磨成分: 酸化アルミナ	無
	結合剤 : 接着剤	無

【使用目的又は効果】

炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材をいう。
レーズ用ホイールである。

【使用方法等】

：本品は、ホイール状に硬化加工された歯科技工用アブレイブ研削器具である。
本品は、歯科用レーズエンジンの装着して使用する。
(最高使用回転数：8,000回転/分)

【使用上の注意】

- ・8,000回転/分の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。
- ・使用にあたっては歯科用レーズエンジンメーカーの指示に従って、ホイールを確実に竹の子にねじ込み緩みがないことを確認すること。
- ・使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ・変形、キレツ、損傷等のあるものは使用しないこと。
- ・本材を使用して研磨を行う場合は、局所集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本材使用により発疹、温疹、発赤、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる又は受けること。

- ・本材は研削、研磨の際には保護メガネ等を使用すること。
- ・本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせる又は受けること。
- ・本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前点検〕

使用前にはルーペ等により傷等の検査を行う。

【保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気に暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社 プロップ
電話 052-618-5777

取扱説明書を必ずご参照下さい。