

歯科材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN70893000

# パラフィンワックス

## 【警告】

本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

## 【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

## 【形状、構造及び原理等】

形状：板状

サイズ：厚さ：1.4mm 大きさ：170×85mm

主成分：パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、マイクロクリスタリンワックス、色素等

## 【物理的性質 加圧短縮率%】

温度	短縮率(%)
21℃	2.0%未満
37℃	3.0%未満
45℃	50.0%未満

## 【使用目的又は効果】

義歯の仮床、人工歯の排列、ロー堤作製に用いる。

## 【使用方法等】

### 【義歯の仮床】

- ①本品を作業模型の大きさに合わせてカットします。
- ②本品を火炎等で適度に軟化し、作業模型に圧接します。
- ③過不足部分を削除又は追加し、形状を整えます。

### 【ロウ堤の作製】

- ①本品を火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にします。
- ②棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接します。
- ③過不足部分を削除又は追加し、形状を整えます。

### 【人工歯の排列】

- ①本品を火炎等で適度に軟化し、巻き棒状にします。
- ②棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接します。
- ③過不足部分を削除又は追加し、形状を整えます。
- ④歯科技工の通方に従い、人工歯を排列します。

## 【使用上の注意】

### 1) 使用注意

本品は【使用目的又は効果】の項目及び鑄造用ロウ型作製以外の目的には使用しないこと。

## 【保管方法】

- ・室温保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社 プロップ  
電話 052-618-5777