

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス JMDN70894000

パラフィン 0.8シートワックス

【警告】

本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形状：板状

サイズ： 厚さ：0.8mm 大きさ：146×74mm

主成分：パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、マイクロクリスタリンワックス、色素等

[物理的性質 加圧短縮率%]

温度	短縮率(%)
21℃	2.0%未満
37℃	3.0%未満
45℃	50.0%未満

【使用目的又は効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いるワックス。

【使用方法等】

【金属床ろう型作製手順】

- ①本品をエバンス等で適量切り取り、石膏模型（耐火模型）に圧接します。
- ②通法に従いシートワックスを金属に置き換えてください。

【使用上の注意】

1) 使用注意

本品は【使用目的又は効果】の項目外の目的には使用しないこと。

【保管方法】

- ・室温保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社 ブロップ
電話 052-618-5777