

歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

ラインワックス

【警告】
本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
有限会社 ブロップ
電話 052-618-5777

【禁忌・禁止】
・指定された用途以外には使用しないこと。
・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

形 状：線状×200mm
サイズ：下記表のとおり

番号	形状	幅径(直径)(mm)	高さ(mm)	1包(本数)
R 10	●	φ1.0	－	100
R 12	●	φ1.2	－	100
R 15	●	φ1.5	－	100
R 20	●	φ2.0	－	100
R 25	●	φ2.5	－	50
R 32	●	φ3.2	－	25
R 35	●	φ3.5	－	25
R 40	●	φ4.0	－	25
R 50	●	φ5.0	－	10
R 60	●	φ6.0	－	7
H 14	▲	1.4	1.1	100
H 16	▲	1.6	1.1	100
H 18	▲	1.8	1.1	100
H 19	▲	1.9	1.0	100
H 22	▲	2.2	1.2	100
H 28	▲	2.8	1.1	100
P 40	■	4.0	1.0	50
L 31	▲	3.1	1.4	50
L 35	▲	3.5	2.0	50

R:円型 H・P:半円型 L:楕円型

主成分：パラフィンワックス、ビーワックス、カルナバワックス、色素等

【使用目的又は効果】
ロストワックス法により、義歯用クラスプ、バー、金属床のろう型、スブルー線及び各種ベント用として使用する。

【使用方法等】
歯科技工のロストワックス法の通法に従い、義歯のバー、クラスプ等の鋳造ろう型を製作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

【使用上の注意】
本品は**【使用目的又は効果】**の項目以外の目的には使用しないこと。

【保管方法】

- ・室温保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。