

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN16189000

ピーピーCAD/CAMワックス

【形状、構造及び原理】

形状：円盤状

サイズ：98 mm × 14 mm (ハード・ミディアム・ソフト)
98 mm × 17 mm (ハード・ミディアム・ソフト)
98 mm × 20 mm (ハード・ミディアム・ソフト)
98 mm × 14 mm (アイボリー・ブルー)
98 mm × 17 mm (アイボリー・ブルー)
98 mm × 20 mm (アイボリー・ブルー)

成分：パラフィンワックス、色素等

原理：歯科技工用コンピュータ支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、鋳造物のロウ型に用いる。

【保管方法】

- ・冷暗所保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管、放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を備えること。
- ・本品は火気厳禁の場所に保管し、保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社プロップ
電話 052-618-5777



【性能及び安全性に関する規格】

[外観特性]

キズ、ワレ、ヒビ等が無く安定していること。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン、ブリッジ等ロストワックス法による固定式補綴修復物のロウ型に用いる。

【使用方法等】

[本材を使用する機械]

歯科技工用コンピュータ支援設計・製造ユニット

[使用方法]

CAD/CAM 加工機等を用いて加工を行い必要に応じてマージンの調整を行い、通法に従い埋没、焼却、鋳造を行う。

【使用上の注意】

- ・再溶解して使用しないこと。
- ・本材は、可燃性であるので、使用の際、引火しないよう注意すること。
- ・過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。
- ・本材は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。