

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 JMDN70891000

プロップ ジー・ジェイ シリコーン

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療従事者以外使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

【概要】

：歯科複模型用ゴム質弾性印象材
本品は、歯科複模型の作製に用いる。

【形状・構造】

本品は、液状A剤・B剤より構成される。
A剤：ホワイト（ベース）
B剤：ブルー（キャタリスト）

【原理】

本品のA剤とB剤を混合し、練和すると硬化する。

硬化条件	23℃
白金触媒含有	B 剤
混合比（重量比）	A 剤：B 剤＝100：100
ショア硬度A	21
引裂強度	>1.51N/mm
引張強度	2.39N/mm ²
作業可能時間（23℃）	2分30秒～3分
硬化時間（標準）	23℃/12分
寸法変化	-0.05%

【使用目的又は効果】

シリコーンの合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

【使用方法等】

- 1) A剤、B剤を1：1の割合で均一になるまで、1分程度手早く練和します。
- 2) 空気を巻き込まないように注意し、室温で硬化後、脱型してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
本品は【使用目的又は効果】の項目以外の目的には使用しないこと。
- 2) A剤、B剤は、同一ロットの組み合わせで使用して下さい。
- 3) 他の製品と混用しないで下さい。
- 4) 開封後は、できるだけ速やかに使用して下さい。
- 5) 本品は、印象採得以外に使用しないで下さい。
- 6) 本品は、歯科医療有資格者以外は、使用しないで下さい。

【保管方法及び使用期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本品を高温の場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所等）に保管しないこと。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・開封後は、密閉、保管して下さい。
- ・本品は、包装に記載の期限までに使用して下さい。
※通常の使用条件において、3年間。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
有限会社 プロップ
電話 052-618-5777