

医 04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN35531000

プロップドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・天然ゴムを使用したドレープの場合は、天然ゴムアレルギーが判明している患者に使用しないこと。
(アレルギー性症状を起こす恐れがある。)

【形状、構造及び原理】

組成 : 不織布及び不織布・ポリエチレンフィルムの貼り合せ品
形状・構造 : 全体サイズ (60cm×60cm、200cm×300cm 等) 及び穴ずれ防止の粘着テープ又は粘着性フィルムドレープ貼り合せによって種類は異なる。

【使用目的又は効果】

手術時に手術部周辺を覆う不織布製品で手術部を清潔に保つ為に使用される。

【操作方法又は使用方法等（用法・用量を含む）】

本品はディスポーザブル製品であり、再使用はできない。

- ①滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れが無いことを確認する。
- ②滅菌包装を開封し、無菌敵に取り出す。
- ③消毒した手術部周辺を覆う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れが無いことを確認する。もし損傷や水濡れがあれば使用しないこと。
- 2) 使用前には本品の破損、その他欠陥が無いことを確認すること。
- 3) 操作台カバーフィルム附近では生理食塩水等の液体を多量に使用しないこと。液漏れによる操作機器故障の原因になることがあります。
- 4) 粘着テープ又は粘着フィルムドレープをはがす際には、皮膚よりゆっくりとはがすこと。またはがす際には押さえている手をこまめに粘着境界部に移動し、皮膚に緊張をかけないよう配慮すること。
- 5) 本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。
- 6) 高齢者等で皮膚が弱い方の場合、粘着テープまたは粘着フィルムドレープの貼付時・剥離時には、注意が必要である。特に皮膚に緊張をかけないようにすること。皮膚が引っ張られて炎症を起こすことがある。
- 7) 包装開封後は直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。
- 8) 本品は包装に記載されている有効期限内に使用すること。

【保管方法及び使用期間等】

- 1) 直射日光、水濡れ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。
- 2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等を避けて安定した状態で保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- 4) 有効期限：有効期限を包装に表示
自己認証（自己データによる）

【包装】

1 ～ 500 枚 / 箱

<発売元>

株式会社 アイテックス
〒141-0031
東京都品川区西五反田 8-1-3 PMO 五反田 4F
電話 03-5436-6770

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社プロップ
電話 052-618-5777