

2010年5月（様式A第1版）
2016年7月（様式A第2版）
2021年7月（様式A第3版）

医療機器届出番号 14B3X00023000011

再使用禁止

器具機械（64）歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ（JMDNコード：31848000）

ディスポーザブルペリオプローブ

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用しないこと。【感染防止のため】

【形状・構造及び原理等】

1) 形状



2) 材質・組成

ポリカーボネート製の歯周ポケットプローブ。

耐熱温度：115℃

【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる歯科手用器具。

【使用方法等】

口腔内に本品を挿入し、歯周ポケットの深さを測定するために使用する。

【使用上の注意】

- 1) 本品を絶対に細工加工しないこと。事故・破損等の原因になります。
- 2) 本品が変形する可能性がありますので、加熱しないこと。
- 3) 本品は、使用目的の用途記載以外には使用しないこと。
- 4) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ①器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ②使用前に必ず、洗浄、滅菌をすること。洗浄、滅菌・消毒については【保守・点検に係る事項】を参照すること。
- ③使用目的（手術・処置・技工を含む医療行為）以外は使用しないこと。また、折損・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- ④本品は再使用禁止ですので、使用後は直ちに廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ①直射日光のあたる場所や、高温、水、湿気の多い所を避けて保管すること。
- ②本品は、歯科従事者以外にはふれないように適切な保管・管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- ①使用（滅菌）前に、汚れ・傷・曲がり等異常がないか点検すること。
- ②強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがありますので使用を避けること。また、金属タワシ・クレンザー（磨き粉等）は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

③本品の汚れ除去時には、ワイヤーブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。破折、性能・品質等の低下の原因になります。

④本品の滅菌は、エチレンオキシドガス滅菌が可能です。尚、本品を長時間薬液・水中に浸漬させないこと。また、次の薬液は使用しないこと。超酸性水・塩化ベンザルコニウム・塩化ベンゼトニウム・次亜塩素酸ナトリウム・フェノール・塩酸加フェノール水等。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

製造販売業者：プログレックス株式会社

電話番号：045-834-2311

FAX番号：045-834-2263

製造業者：プログレックス株式会社