

**2021年4月改訂(第4版)

*2016年10月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

機械器具(29) 電気手術器
 一般医療機器 一般的名称: 単回使用電極クリーナー JMDNコード: 70654000

チップクリーナー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

50(W) × 50(D) × 5(H) (mm)

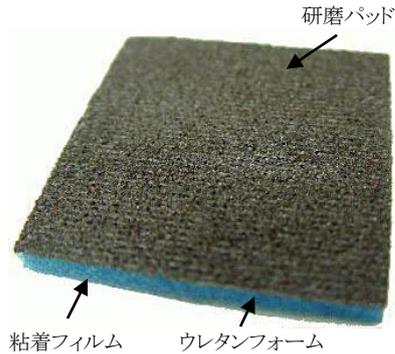

2. 材料

酸化アルミニウム、軟質ポリウレタン、硫酸バリウム、
 ポリエステル

【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等を除去することを目的とした、単回使用のクリーナー。

【使用方法等】

滅菌済みにつき、包装開封後そのまま直ちに1回限り使用する。

1. 本品を滅菌包装から取り出し、裏面(研磨面と反対側)の保護紙を取り除く。
2. 患者ドレープ等の術部に近い、使用しやすい場所に、粘着フィルムで固定する。
3. 電気手術器の使用中に、適宜、本品の研磨パッド面で電極の先端部を擦って、付着した炭化物等を除去する。
4. 手術終了後本品は廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品は電極に付着した炭化物等を除去する目的以外では使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 本品の使用は1回限りで、再滅菌・再使用はしないこと。
- 万一、包装が破損していた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて、清潔な場所に保管すること。
- ** ●有効期間: パッケージの有効期限を参照のこと。[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

「製造販売業者」

株式会社プロシード

TEL: 03-5468-1666

FAX: 03-5468-1650

http://www.proseedcorp.com/

「製造業者」

Shining World Health Care Co., Ltd. シヤイニング ワールド

ヘルス ケア

カンパニーリミテッド

台湾

TAIWAN