

\*\*2021年7月改訂(第4版)

\*2015年4月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

機械器具(58) 整形用機械器具  
 一般医療機器 一般的名称: 歯科インプラント技工用器材 JMDNコード: 70757000

## Cleanlant 技工用器材

### 【禁忌・禁止】

Dentis 社製の歯科用インプラント以外に使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

本品は、Dentis 社製の歯科用インプラントの上部構造を作成するために用いる歯科技工用の器具である。製品名、サイズ等については包装表示ラベル又は本体に記載されている。

#### 1. ラボ アナログ



#### 2. プラスティックコーピング



#### 3. i-Fix 用テンポラリーキャップ



### 【原材料】

1. チタン 2. 3. ポリアセタール

### 【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作成するために用いる歯科技工用の器具である。

### \*【使用方法等】

- ラボ アナログ  
印象採得後のトランスファータイプのインプレッションコーピングに装着して、サイズや方向性の確認を行う。
- プラスチック コーピング  
作業模型上のラボ アナログに被せ、適当な高さで切断し、ワックスアップによりクラウン又はブリッジ用のワックスパターンを製作する際に使用する。
- i-Fix用テンポラリーキャップ  
作業模型上のラボ アナログに被せ、ワックスアップによりクラウン又はブリッジ用のワックスパターンを製作する際に使用する。

### 【使用上の注意】

#### ＜重要な基本的注意＞

- 本品使用に際し、予め手術手技及びその手順について十分に熟知した後、使用すること。
- 器具は正しく接続して使用すること。
- \*\*3. Dentis 社製の歯科用インプラントの添付文書を必ず読んでから使用すること。**

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 常温保存

#### 【保守・点検に係る事項】

- 使用前に、キズ、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査を実施すること。
- \*\*2. 器材に劣化ないしは問題がある場合には使用しないこと。**

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 「製造販売業者」

株式会社プロシード

TEL:03-5468-1666 FAX:03-5468-1650

<http://www.proseedcorp.com/>



##### 「製造業者」

Dentis Co., Ltd. デンティス カンパニー リミテッド  
 Korea 大韓民国