

**2021年7月 改訂(第4版)

*2016年7月 改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 一般的名称: 汎用ストップコックバルブ JMDNコード:35375001

ラップガード

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 形状



2) サイズ

チューブ長: 29.0cm

3) 材料

カーボン、SBS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ニトリル

【使用目的又は効果】

ガスフローを制御するために用いる器具をいう。通常、耐久性材料製(プラスチック、金属等)で、様々な用途に用いる。

【使用方法等】

<準備>

本品は滅菌済の製品であるので、包装に破損及び亀裂等がないことを確認する。

<使用方法>

1. 包装を開封、本品を取り出す。
2. コネクター部を、トロカールのガスポートに接続し、締めこむ。
4. ガスポートのバルブを開く。
3. 本品のクレンメのローラーを回して調節し、体腔内のサージカルスモークの排出を制御する。
もしくはフローを閉じておいて、体腔内がサージカルスモークで充満してきた時にクレンメを開放してサージカルスモークを排出する方法の、いずれかを用いる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 本品の使用は1回限りで、再滅菌・再使用はしないこと。
- 万一、包装が破損していた場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管すること。
- ** ●有効期間: パッケージの有効期限を参照のこと。[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*「製造販売業者」

株式会社プロシード
 TEL:03-5468-1666 FAX:03-5468-1650
<http://www.proseedcorp.com/>

ProSeed

「製造業者」

LiNA Medical ApS リナメディカル エーピーエス
 Denmark デンマーク