

デジタルライトボックス スタイラス

【禁忌・禁止】

- ・ 本品を無菌環境下で使用する時は必ず滅菌すること。
- ・ 滅菌して再使用できる回数は20回である。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、デジタルライトボックス(医療機器承認番号: 22000BZX01649000)を使用するために用いる機器である。

2. 製品外観

製品番号	製品名
54209	デジタルライトボックス スタイラス

外観:



原材料: ポリスルフォン

3. 原理

本品は、デジタルライトボックスを使用するために用いる機器である。本機器のハンドル部分を手に取って、先端をデジタルライトボックスの操作したい部分(パネルの表示部分)に接触させる。

【使用目的又は効果】

本品は、デジタルライトボックスを使用するために用いる機器である。再使用可能である。

【使用方法等】

<使用前>

本品の使用に際しては必ず洗浄を行い、無菌環境下で使用する時は下記の方法および条件で滅菌を行うこと。なお、滅菌して再使用できる回数は20回である。

滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	132℃	4分間

<使用方法>

本機器の使用目的は、デジタルライトボックスを操作するために使用する。

本品のハンドル部分を手にとって、先端をデジタルライトボックスの操作したい部分(パネルの表示部分)に接触させる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本品は、注意をもって取り扱い、落下させないよう注意すること。
- ・ 本品は、デジタルライトボックスのみに使用すること。
- ・ 使用していないときは、不用意な接触を避けるため、スタイラスホルダーに取り付けられた本品を壁側に向けること。
- ・ スタイラスホルダーに取り付ける際、短い方の柄をホルダーに取り付けること。
- ・ 本品の滅菌再使用回数は20回までである。それ以降は新品に交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

常温・常圧下にて保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

- (1) 自動洗浄と消毒を行う。

洗浄に使用する洗剤は、機器の洗浄に適したものを使用する。濃度については洗剤メーカーの取扱説明書を参照する。

- (2) 高圧蒸気滅菌を行う。

EN ISO 17665 および AAMITIR 12-2004 に準拠した滅菌方法を使用すること。

滅菌温度: 132℃

滅菌時間: 4分以上

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者] ブレインラボ株式会社

電話番号: 03-3769-6900

[製造業者] ブレインラボ エージー

Brainlab AG

製造国名: ドイツ連邦共和国