


機械器具(50)開創又は開孔用器具
一般医療機器 開孔器 35517000

販売名 ペリスペック (ディスポーザブル腔鏡)

再使用禁止

【禁忌・禁止】 ・再使用禁止

【形状・構造等】

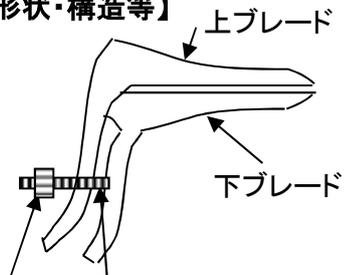

ナット部 ネジ部

* L, M, S, Mini 4種類のサイズがあります。

* 材質 上・下ブレード部 : ポリスチレン
ナット・ネジ部 : ポリスチレン

・ハンドルを握ることにより、両ブレードが開き、ナットを動かすことで任意の位置の開き量を固定できます。

【使用目的又は効果】

・婦人科的診察、処置及び手術に際し、腔部を開孔するのに用いる使い捨て器具です。

【使用方法等】

- ・個別包装されたペリスペックを開封してください。
- ・両ブレードを閉じた状態で腔内に徐々に且つ優しく挿入してください。
- ・腔内の所定箇所到達したら、徐々にハンドルを握り、両ブレードを開いてください。
- ・ナットを動かし、ご希望の開孔位置を保ってください。
- ・検査終了後は、ナットをゆっくりと緩め両ブレードを閉じて、ゆっくりと腔内から引き抜いてください。

【使用上の注意】

- ・使用に関し潤滑剤が必要な場合には、水溶性潤滑剤又は水をご使用ください。
- ・子宮頸部スミア採取にご使用の際は、水溶性潤滑剤又は水以外のご使用はお勧めできません。
- ・検査終了後は、まず子宮頸部との接触を避けるために少し引き抜いてからナットを緩めてください。
- ・再使用を目的とした洗浄又は滅菌処理はできません。
- ・包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常が見られるものは使用しないでください。
- ・包装を開封したらすぐ使用し、使用後はもとの袋に戻して、感染防止に留意し安全な方法で処分してください。
- ・本製品の使用は、専門医により行ってください。
- ・腔痙攣が生じた場合には、両ブレードを力ずくで開けることなく、専門医の十分な対応後、上記方法で引き抜いてください。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・保管は、水濡れに注意し、高温・高湿・直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で専用カートン単位で保管願います。

<使用の期限>

- ・滅菌日より5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 不二精機株式会社 ヘルスケア商品部

〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-8-4 井門瓦町第2ビル5階

TEL : 06-7166-6824

製造業者 : Williams Medical Supplies Ltd. (U.K.)