


販売名 古山式POP-Q腔鏡

【警告】

●使用後に本品を取り扱う際は、必ず手袋を着用するなど感染対策に努めること

【形状・構造等】

1. 形状

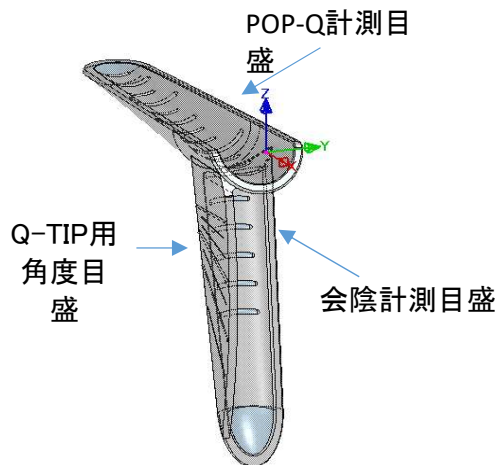

2. 材質 ポリサルフォン樹脂 (FDA承認)

【使用目的又は効果】

本品は透明樹脂製の片弁の腔鏡で、女性骨盤底臓器の下垂・脱出ならびに尿道の過可動の程度と計測するために、腔鏡本体とハンドル部に目盛が一体に構成され、女性骨盤底の理学的診断に用いる。

本品は再使用可能である。

・外観: 目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥、または汚染物を認めないこと。

・オートクレーブで滅菌でき、再使用が可能である。

【使用方法等】

・使用前に器具が洗浄・滅菌されていることを確認してください。また傷、破損、変形がないことも確認してください。

・使用後に本品に異常がないことを確認してください。

・使用後は、付着している血液、体液、組織および薬品が乾燥しないうちに洗浄液等に浸漬してください。

・洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・目視検査にて本体に機能を損なうような欠陥、又は汚染物がないことを確認してください。

・本品を使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないでください。

・本品を購入後初めて滅菌・消毒する場合は、洗浄処理を行ってから滅菌消毒してください。

・過度の力を加えたり、無理な使用はしないでください。器具の損傷の原因になります。

・器具に異常がある場合や破損している場合は使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

・感染防止の為、使用後は出来るだけ早く、血液、体液、組織等の汚染物を除去し、洗浄してください。

・洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには

器具同士が接触して破損することがないように注意してください。

・洗剤の残留がないように充分すすぎをしてください。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨します。

・強アルカリ/強酸性洗剤は、器具を腐食させるおそれがありますので、使用しないでください。

誤ってこれらが付着したときには、直ちに水洗いをしてください。

・金属たわしや、クレンザー(磨き粉)は器具の表面を傷つけますので、使用しないでください。

2. 消毒・滅菌

・本品を滅菌する場合は、日本薬局方 参考情報 11.微生物殺滅法 2.滅菌法 2-1 加熱法及びISO/TS

17665-2に示される条件を準用してください。また滅菌器に関する詳細は滅菌器の取扱説明書に従ってください。

滅菌条件	
温度	時間
121~124°C	15分以上
126~129°C	10分以上
134°C	3分以上

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

次の使用

【参考文献】

・医療現場における滅菌保証のガイドライン2005
発行: 日本医科器械学会

・器械の正しいメンテナンス法 第8版 2004

翻訳・監

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売元

不二ヘルスケア商品部

〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-8-4

井門瓦町第2ビル5階

TEL: 06-7166-6824

■製造元: 不二精機株式会社