

販売名 P-バンド


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 就寝時には本品を使用しないこと
2. 陰茎を過度に圧迫しないこと(組織壊死のおそれがあるため)
3. 2～3時間毎に平面ファスナーを緩め排尿すること

【形状・構造及び原理等】

構造及び各部の名称

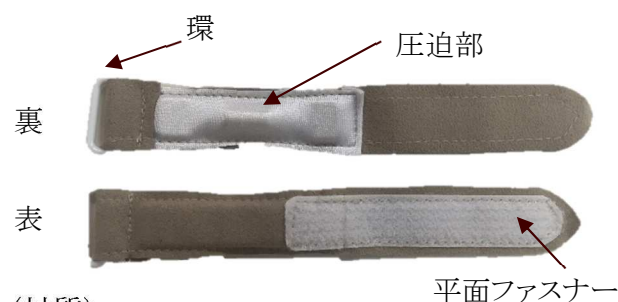

(材質)

本体:フェルト／ポリエステル

環:ABS樹脂

圧迫部:エラストマー

平面ファスナー:ポリエステル

(原理)

陰茎下部の尿道に外圧を加えて、尿漏れを防ぐために使用する

【使用目的又は効能及び効果】

陰茎下部の尿道に外圧を加えて、尿漏れを防ぐために使用する

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 使用前に本品の外観上に異常がないことを確認する。
- 2) 圧迫部が尿道にあたるように本品をまく
- 3) 先端を環に通し、過度に締め付けないように調節しながら平面ファスナーで固定する



2. 使用方法に関連する使用上の注意

2～3時間毎に平面ファスナーを緩め排尿すること

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 陰茎の皮膚に痛みや腫れ又は圧迫による創傷などの異常がある場合には本品を使用しないこと
- 2) 陰茎の血流に障害をきたさないよう、過度な締め付けを行わないこと
- 3) 排尿時に痛みや血尿などの症状が出た場合には直ちに使用を中止すること

2. 不具合・有害事象

本品の使用に際し、以下のような有害事象が生じる可能性がある。

- 1) 固定部の皮膚炎
- 2) 過度な締め付けによる組織壊死

【貯蔵保管方法及び有効期間等】

1. 水や薬液のかからない場所に保管すること。
2. 高温・多湿となる場所は避け、湿気やほこりの多いところへの保管は避けること

(有効期間)

製造日より5年[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒

- 1) むるま湯等で湿らせた柔らかい布で清拭する。
- 2) 洗浄には、アルコール、消毒剤、洗剤など皮膚への刺激が強いものは使用しないこと

2. 点検

使用前に破損、変形、変色等の損傷がないか確認すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売元

不二精機株式会社

〒541-0048 大阪市中央区瓦町 4-8-4 井門瓦町第2ビル 5階

TEL : 06-7166-6824

■製造元 : 不二精機株式会社 松山工場

※A4サイズの当該添付文書をご入用の方は、送付いたしますので上記製造販売元までお求めください。