

機械器具62 歯科用切削器  
一般医療機器 歯科用エキスカベータ JMDN 35811000

## エキスカベーター

### 【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]

本品は、作業部、シャンク部（作業部とハンドル部をつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。

代表例を示す。



[種類]

作業部とシャンク部の形状により、以下の種類がある。

- ・イングリッシュパターン
- ・イングリッシュパターン ゴールドスタイン
- ・ポピュラータイプ
- ・エンド用
- ・グリック
- ・オーバル
- ・ダービーペリー オーバル
- ・ブレード
- ・マイクロサージャリー用アボラス
- ・呼称なし

また、それぞれの種類には、以下のすべて、あるいはいずれかの形態がある。

規 格	1, 2, 3, 4, 5 6, 14, 17, 18, 19 17W, 18W, 19W, 31L, 31W 32L, 33L 243, 244, 245, 246 36/37, 38/39, 40/41, 44/45 61/62, 63/64, 65/66 125/126, 127/128, 129/130 131/132, 153/154, 220/221 E1, E2, E3
	角柄（2番ハンドル） 丸柄（41番ハンドル） 丸柄（ブラックライン） サテンスチール（6番ハンドル） サテンスチールカラー（7番ハンドル） レジンエイト（8番ハンドル） エバーエッジ（9番ハンドル）

原材料：ステンレス鋼、AlTiN、シリコーン、合成樹脂

### 【使用目的、又は効果】

齶蝕部の除去に用いる。

### 【使用方法等】

把持部を手に持ち先端部の切刃で、齶蝕象牙質を切断及び除去する。

<滅菌方法及び滅菌条件>

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

### 【使用上の注意】

[使用方法]

- (1) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (2) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (3) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
  - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
  - ③バーナ等による加熱
- (4) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- (5) 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- (6) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- (7) 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取除かれていることを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損等の異常がないか点検すること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社アルファメッド  
東京都港区西麻布3-6-4

<販売業者・問い合わせ先>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)  
HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG  
DEUTSCHLAND (ドイツ)