

機械器具64 歯科用探針  
 一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN 31848000

## カラーコードプローブ

### 【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、黒色にカラーコードされた目盛を付与した作業部、シャンク部（作業部とハンドル部をつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。

代表例を示す。



〔種類〕

本品には、以下の種類がある。

品番の末尾にハンドルの種類を示す数字が表示される。

⑤、②=品番のみ、③=品番+6、④=品番+7、  
 ⑤=品番+8、⑥=CH

種類	品番	①	②	③	④	⑤	⑥
CP2	PCP2	●		●			
CP8	PCP8	●		●			
CP10	PCP10	●		●	●	●	
CP11	PCP11	●		●	●	●	
CP11.5B	PCP11.5B	●		●	●	●	
CP12	PCP12	●		●	●	●	
CP12/11.5B	P12/11.5B		●	●			
CP12/QOW	PCP12/QOW			●			
CP18	PCP18	●		●		●	
CPUNC12	PCPUNC12	●		●	●	●	
CPUNC15	PCPUNC15	●		●	●	●	
UNC15/11.5B	P15/11.5B		●	●			
ゴールドマンフォックス /ウィリアムズ	PCPGF/W		●	●			
メリーランド/ モフィット	PCPMDBIU	●					
シンウィリアムズ	PCPQOW11.5		●				
	PQOW	●		●	●	●	
	PQOW11.5B			●			
ミシガン	PQO	●		●			
ウィリアムズ	PQW	●		●	●	●	
ネイバーズ	PQ2N		●	●	●	●	
インプラントスペーサー	PCP6500	●		●			
カラービュー用ハンドル	PH			●			●
	PH0			●			

### ハンドルの種類

- ① 丸柄（30番）
- ② 丸柄（31番）
- ③ サテンスチール（6番）
- ④ サテンカラー（7番）
- ⑤ レジンエイト（8番）
- ⑥ スムースサテンスチール（SS番）

・原材料：ステンレス鋼、合成樹脂

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査（歯周ポケットの深さ測定）に用いる。

### 【使用方法等】

作業部を歯肉構（歯周ポケット）に挿入し、目盛を読み取って深さを測定します。

### <滅菌方法及び滅菌条件>

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

### 【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (2) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (3) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
  - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
  - ③バーナ等による加熱
- (4) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- (5) 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- (6) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- (7) 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に除去されていることを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、

- 適正な濃度で使用すること。(使用上の注意参照)
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
  - ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
  - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
  - ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損等の異常がないか点検すること。
  - ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
  - ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

<製造販売業者>

株式会社アルファメッド  
東京都港区西麻布3-6-4

<販売業者・問い合わせ先>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)  
HU-FRIEDY MFG.CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG  
DEUTSCHLAND(ドイツ)