

はさみ 歯肉用

【禁忌・禁止】

[適用対象（患者）]

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]

本品は、作業部（刃部）及び把持部からなる。代表例を示す。



[種類]

作業部と把持部の形状により、以下の種類がある。
品番一覧

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| アイリス | S18 | S17 |
| カストロビージョ | S31 | |
| クインビー | S8 | |
| ケリー | S1 | S1L S2 S2L |
| コーテリーニ | SCORT | |
| ゴールドマンフォックス | S16 | |
| サリバン | S15 | |
| ジョセフ | SJC | SJS |
| スーパーカット アイリス | S18SC | S17SC |
| スーパーカット コーテリーニ | SCORTSC | |
| スーパーカット ゴールドマンフォックス | S16SC | |
| スーパーカット ヒューフレディ | S10SC | |
| スーパーカット ラグランジュ | S14SC | |
| ストラビスマス | S40 | |
| ディーン | S9 | |
| パーマシャープ アイリス | S5083 | S5082 |
| パーマシャープ ケリー | S5001 | S5002 |
| パーマシャープ ゴールドマンフォックス | S5081 | S5080 |
| パーマシャープ ディーン | S5009 | |
| パーマシャープ メツェンバウム | S5054 S5055 S5056 S5057 S5069 | |
| パーマシャープ ロックリン | S5011 | S5012 |
| ヒューフレディ | S10 | |
| ブラックライン スーパーカットアイリス | S18SCX | S17SCX |
| ブラックライン スーパーカット ゴールドマンフォックス | S16SCX | S20SCX |
| ブラックライン スーパーカット マイクロ カストロビージョ | SPVX | |
| ブラックライン スーパーカット メツェンバウム | S19SCX | |
| ブラックライン スーパーカット ラグランジュ | S14SCX | |
| マイクロ カストロビージョ | SPV | STMBH |
| マイクロ カストロビージョ スイスペリオ | SPSPV | SPSPV45 |
| メイヨー | S3 | S4 |
| メツェンバウムベビィ | SMB | |
| ラグランジュ | S14 | |
| ロックリン | S11 | S12 |
| ワグナー | S5 | S6 S7 |

・原材料：ステンレス鋼、チタン合金、AlTiN

【使用目的又は効果】

歯科手術に用いる歯科用歯肉はさみである。

【使用方法等】

把持部を手に持ち、2枚の刃で、歯肉を切断します。

<滅菌方法及び滅菌条件>

| 滅菌方法 | 滅菌条件 | 乾燥時間 |
|-----------|-------------------------|-------|
| 真空脱気式蒸気滅菌 | 温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分 | 30分以上 |
| 重力置換式蒸気滅菌 | 温度：121℃ 暴露時間：30分 | 30分以上 |

・141℃以上に加熱しないこと。

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

【使用上の注意】

[使用方法]

- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
 - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
 - ③バーナ等による加熱
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取除かれていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4

<販売業者・問い合わせ先>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)

HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG

DEUTSCHLAND(ドイツ)