

2026年4月作成（第1版）

機械器具36 医療用ピンセット
 一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN 31814000

ティッシュプライヤー

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、縫合する組織を閉じて挟む2本の作業部をもつ手用器具である。
 代表例を示す。



〔種類〕

本品には、以下の種類がある。

品番一覧

種類	品番
アドソン	TPA15 TP41 TP42
アドソン マイクロ	TPMSA
アドソンブラウン	TP43 TP43A
クレイマー・ネビンズ	TPKN
ジェラルド	TPG1 TPG3 TPG4
セムキンテイラー	TP31 TP32 TP33 TP34
パーマシャープ アドソン	TP5041 TP5042
パーマシャープ アドソンブラウン	TP5043
パーマシャープ キューシング	TP5060 TP5061
パーマシャープ キューシング ベアネット	TP5062
パーマシャープ ジェネラル	TP5070 TP5071
パーマシャープ ジェラルド	TP5050 TP5051
パーマシャープ ドベイキー	TP5090 TP5091
パーマシャープ ポッツスミス	TP5080
ヒューフレディ	TP16
フォックス	TP50 TP50L
マイクロ	TPSLCOCMN TPSLCOSM
マイクロ スイスペリオ	SPTPDSSPV SPTPDAPV
マイクロ ダイヤモンドダスト	TPDAPV TPDSCPV 8-905DD
マイクロ チタン	TPASTMBH
マイクロ チタン ダイヤモンドダスト	TPCSTMBH TPSSTMBH
ロシア	TPR6 TPR8

原材料：ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

縫合する組織を把持・固定する。

【使用方法等】

縫合する組織を閉じて挟み、把持・固定する。

＜滅菌方法及び滅菌条件＞

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。
 上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
 - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
 - ③バーナ等による加熱
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損等の異常がないか点検すること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

AHF-G20101-001

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4

<販売業者・問い合わせ先>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)
HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND(ドイツ)