

2026年4月作成（第1版）

機械器具36 医療用ピンセット  
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN 31814000

## 縫合用プライヤー

## 【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

## 【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、縫合する組織を閉じて挟む2本の作業部をもつ手用器具である。作業部先端には、縫合用糸針を過すための孔が開いている。

代表例を示す。



〔種類〕

本品には、以下の種類がある。

品番一覧

種類	品番
コーン	SP20
マイクロサージカル コーン	SPM20
マイクロサージカル サイナスライン	SP20SLEM

・原材料：ステンレス鋼

## 【使用目的又は効果】

縫合する組織を把持し、先端部の孔に糸針を通すのに用いる。

## 【使用方法等】

縫合する組織を閉じて挟み、作業部先端の孔に糸針を過して使用します。

&lt;滅菌方法及び滅菌条件&gt;

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。  
上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

## 【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
  - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
  - ③バーナ等による加熱
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドン

- ヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- (5) 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
  - (6) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
  - (7) 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

## 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損等の異常がないか点検すること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

&lt;製造販売業者&gt;

株式会社アルファメッド  
東京都港区西麻布3-6-4

&lt;販売業者・問い合わせ先&gt;

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号：03-4550-0660

&lt;外国製造業者&gt;

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)  
HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG  
DEUTSCHLAND(ドイツ)