

ミラー

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、作業部（ミラー）及びハンドル部からなる。

代表例を示す。



【種類】

作業部の形状により、以下の種類があり作業部（ミラー）とハンドル部が一体となったワンピース型と分離されたセパレート型がある。

品番一覧（セパレート型）

| | | |
|---------------------|----------------|--|
| ミラー トップ | 片面 | MIR4/12 MIR4/3 MIR5/12 MIR5/3 |
| | 両面 | MIR4DS/3 MIR4DS/6 MIR5DS/3 MIR5DS/6 |
| ミラー トップ HD | 片面 | MIR3HD MIR4HD MIR5HD MIR4HD12 MIR4HD3 MIR5HD12 MIR5HD3 |
| | 両面 | MIR4DSHD MIR4DSHD6 MIR5DSHD MIR5DSHD6 |
| ミラー トップ HD BL | 片面 | MIR5HDB MIR5HDBE |
| | 両面 | MIR5DSHDB MIR5DSHDBE |
| ミラー ハンドル | 角柄 | MH1 |
| | 細丸 | MH24 |
| | サテンスチール | MH6 |
| | サテンスチール カラー | MH7 |
| | レジンエイト | MH8 |
| | 目盛付 片頭 #1 | MH6692K |
| | BL | MH6B MHE6B |

品番一覧（ワンピース型）

| | |
|----------------------|-------------------------|
| マイクロサージェリー用 | MM1 MM2 MM3 MMR MMRS |
| マイクロサージェリー用 ベルバート | MMVEL1 MMVEL2 |

原材料：ステンレス鋼、ガラス、
ダイヤモンドライクカーボン、合成樹脂

【使用目的又は効果】

口腔内診査、又は、頬粘膜や舌の排除に用いる。

【使用方法等】

セパレート型

ミラートップをミラーハンドルに取り付け、ハンドル部を把持して使用します。

ワンピース型

ハンドル部を把持して使用します。

＜滅菌方法及び滅菌条件＞

| 滅菌方法 | 滅菌条件 | 乾燥時間 |
|-----------|--------------------------|-------|
| 真空脱気式蒸気滅菌 | 温度：132℃又 134℃ 暴露時間：4分 | 30分以上 |
| 重力置換式蒸気滅菌 | 温度：121℃ 暴露時間：30分 | 30分以上 |

・141℃以上に加熱しないこと。
上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (2) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (3) 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
 - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
 - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
 - ③バーナ等による加熱
- (4) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- (5) 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- (6) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- (7) 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に除去されていることを確認すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損等の異常がないか点検すること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4

<販売業者・問い合わせ先>
ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

<外国製造業者>
Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)
HU-FRIEDY MFG.CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND(ドイツ)