

2026年4月作成（第1版）

機械器具39 医療用鉗子  
一般医療機器 手術用骨鉗子 JMDN 32853000

## 骨鉗子

### 【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品には、プライヤ型、ピストルグリップ型等の形状のものがある。

代表例を示す。



〔種類〕

先端部の形状により、以下の種類（品番）がある。

種類	品番
クリーブランド	R4 R4A R5 R5S
クレイマー・ネビンズ	RKN
クレイマー・ネビンズ ショートノーズ	RKSN
ヒューフレディ	R1 R15 R18
ヒューフレディ ダブルアクション	R18M
フリードマン	RF
ブルーメンタル	RBL RBL45 RBL90
バイヤー ダブルアクション	RBEY
バーラー	RBOE
ミニフリードマン	RMF RMF90
ミード	RIA
ディーン	R3H

・原材料：ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

骨などの硬い組織を締め付けて切断し、除去するのに用いる。

### 【使用方法等】

ハンドル部を把持することにより作業部の先端を開閉させ、骨等を切断又は切除します。

### ＜滅菌方法及び滅菌条件＞

滅菌方法	滅菌条件	乾燥時間
真空脱気式蒸気滅菌	温度：132℃又134℃ 暴露時間：4分	30分以上
重力置換式蒸気滅菌	温度：121℃ 暴露時間：30分	30分以上

・141℃以上に加熱しないこと。

上記は一般的な条件である。使用する滅菌器メーカーの条件を確認すること。

### 【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- 破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ①本製品に対する曲げ、切削、加圧等
  - ②粗雑な扱い（キズをつける、落下させる、強い衝撃を与える等）
  - ③バーナ等による加熱
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- 薬剤等が付着した場合、腐食するおそれがあるので、速やかに清拭すること。
- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌をした後、次回使用に備え保管しておくこと。
- 機器の窪んだ部分や見えない部分は定期的に点検し、残存物等が完全に取り除かれていることを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に汚れ、破損、ヒビ、キズ又は腐食等がないか点検すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社アルファメッド  
東京都港区西麻布3-6-4

＜販売業者・問い合わせ先＞

ヒューフレディ・ジャパン合同会社  
電話番号：03-4550-0660

＜外国製造業者＞

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (米国)  
HU-FRIEDY MFG. CO. LLC ZWEIGNIEDERLASSUNG  
DEUTSCHLAND (ドイツ)