

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

HS医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止
- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、綿100%のガーゼであり、エチレンオキシド（EOG）による滅菌品と未滅菌品とがある。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法等】

1. 使用目的に応じ、適宜使用する。
2. 未滅菌品の場合は、必要に応じ滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

1. 本品の使用は一回限り。再使用しないこと
2. 体内に留置しないこと。
3. 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

<有効期間>

パッケージに記載（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4
TEL: 03-3403-5432

製造業者名：フォメド インダストリーズ インク
(FOMED INDUSTRIES INC)

国名：中国