

パルメロミラー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〔適用対象（患者）〕

本品はクロムを含有するため、クロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

代表例を示す。



- ・原材料：
作業部（ミラー）：クロム膜ガラス
ハンドル部：プラスチック

【使用目的または効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用方法等】

口腔内に入れ、診査又は圧排する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷及び特に鏡面部等に生じた場合は使用しないこと。
- ・高圧蒸気滅菌は行わないこと。
- ・破損等の原因となるため、強い衝撃を与えないよう丁寧に扱うこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4

＜販売業者・問い合わせ先＞

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号：03-4550-0660

＜外国製造業者＞

Palmero Healthcare LLC（米国）
Pacificare Asia Limited（中国）