

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 液体包帯（JMDN コード：33584000）

ケロコート® UV

【禁忌・禁止】

1. 本品を目、粘膜、完治前のケガ、ニキビ、やけど、抜糸前の縫合創などに直接塗布しないで下さい[粘膜の損傷、傷や治癒の悪化につながるおそれがあるため]。
2. 感染している皮膚及び感染の疑いのある皮膚には使用はしないで下さい[治療の悪化につながるおそれがある]。
3. 外用にのみ使用してください。

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

本品（シリコーンジェル）は、液体、半液体、又は粉末及び液体を組み合わせたものであり、以下のごとくスクリュウキャップ付き容器（チューブ）に入っている。

内容量は、6 g 又は 15 g 入りの 2 種類がある。



容器のデザインは、製造元の都合により変わることがある。

＜原材料＞

本 品：ジメチコン、シクロペンタシロキサン、オクトクリレン、
オクチノキサート、ミリスチン酸イソプロピル、
オキシベンゾン、オクチサレート、二酸化シリコン、
ジメチコンクロスポリマー

＜原理＞

本品は柔らかく粘着性のある自己乾燥型のシリコーンジェルで、塗布後すばやく乾いて透明な無色の皮膜シート層を形成して、塗布部位を保護する。

【使用目的又は効果】

本品は、皮膚の傷口を保護又は接合したり、火傷の包帯剤として使用、また、外傷、火傷、ニキビ、手術等のあとの赤くなったり、盛り上がった部位を被覆して保護するのに用いる。

【使用方法等】

1. 適用皮膚部位をきれいに洗浄し、乾燥させます。
2. 適用皮膚部位にシリコーンジェル（ジェル）を非常に薄い層になるように塗布し、乾燥させます。塗布したジェルが 4～5 分以内に乾かないときは、塗布量が多すぎますので余分なジェルを取り除いて乾燥するようにします。
3. 毎日 1～2 回ジェルシート層を水洗いや濡れたタオルなどで取り除いて露出した皮膚部位に新しく塗布します。
4. 最大の効果をあげるために、ジェルが皮膚と 2 4 時間接触しているようにします。

5. 推奨できる最少塗布日数は 60～90 日です。大きな、古い創傷跡はより長時間を要しますので、最初の 90 日間塗布後も自然治癒の活性を維持するために継続的使用をお勧めします。
6. 6 g 入りチューブは 5 cm²、15 g 入りチューブは 10 cm² の創傷跡を 1 日 2 回、最少 90 日塗布するのに十分な量です。
7. 一度乾燥した本品ジェルシート層の上には、包帯、日焼け止め、化粧品等での被覆やお化粧ができます。
8. 関節部、湾曲部、毛髪部、広領域の瘢痕等にも使用できます。

【使用上の注意】

- ・塗布部位周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水泡、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）の場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ・ジェルが完全に乾燥していない場合には衣服等を汚すこともあります。
- ・外用にのみ使用してください。
- ・刺激を感じたら使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ・誤って目の中に入ってしまった場合はすぐに水で洗い流してください。
- ・誤飲するおそれのある子供等の手の届かないところで保管してください。誤って口に入っても人体に大きな影響はありませんが、誤飲などには十分ご注意ください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・多湿、高温、直射日光、及び水ぬれを避け常温で保管してください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

＜有効期間＞

製品の包装に表示（自己認証）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社アルファメッド
電話番号：03-3403-5432 FAX 番号：03-3403-5433

*＜外国製造業者＞

フォーミュレイテッド ソリューションズ, エルエルシー（米国）
（Formulated Solutions, LLC.）
ビオコスメス エスアールエル（イタリア）
（Biokosmes S. r. l.）

＜販売業者・お問合せ窓口＞

PRSS. Japan 株式会社
住所：東京都中央区日本橋小伝馬町 10-11 日本橋府川ビル
電話番号：03-3667-7252 FAX 番号：03-3667-7251