

添付文書

届出番号:20B2X00028000007

類別:機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 一般の名称:温熱用パック(JMDN コード 37240010)

ボディードクター HS

【警告】

1. 本体を当てる部分の温度感覚が鈍っている時(末梢神経麻痺や脊髄炎など)は、火傷を起こしやすいので十分気を付けて使用すること。
2. 本体を加熱しすぎると高温になり、火傷する恐れがあります。適切な加熱温度、加熱条件で使用すること。

【禁忌・禁止】

1. 本機は温熱用パックである。他の目的で使用しないこと。
2. 次のような人には使用しないこと。
 - (1)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害の方。
 - (2)温度感知喪失の方。
 - (3)酒気を帯びた方。
3. 次の方は介護者なしで使用しないこと。
 - (1)麻痺のある方。
 - (2)12歳以下の子供。
 - (3)意思表示ができない方。

【形状・構造及び原理等】



1. 構成

本体 1 個

2. 原理

本体の中に加熱媒体が入っており、本体ごとあたたため患部に当てることで温熱治療を行う。

【使用目的又は効果】

加熱媒体(温熱パック)の入った本体を加熱装置で加熱したものを患部に当て、消炎鎮痛処置(温熱治療)を行う。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

本体ごと、電子レンジに入れて設定出力を約500Wまたは

600Wで約40秒間加熱します。

加熱媒体部が入っている部分を患部に当たるよう装着し、患部を温めます。

ご使用の電子レンジや使用環境、使用頻度により温度が違う場合があります。

【使用上の注意】

1. この添付文書に記載された使用目的以外には使用しないでください。
2. 本体の穴あきや破れ、破損など異常が発見された場合、すぐに使用を中止してください。
3. 加熱媒体(温熱パック)は、水で洗ったり浸したりしないでください。
4. 加熱媒体(温熱パック)を分解しないでください。
5. 加熱媒体(温熱パック)は食べられません。とくに小さなお子様のいるご家庭ではお子様の手の届く場所に置かないでください。
6. 加熱時は必ず電子レンジで加熱してください。電子レンジ以外の熱源で加熱しないでください。
7. 使用中、体調に異常を感じた場合すぐに使用を中止してください。
8. 製品の故障は、お客様がご購入された場所にご連絡ください。

【取扱い上の注意】

1. 温熱パック表面の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
2. 温熱パックを水洗いや水などの液体に浸したりすることはできません。
3. 本体は修理や改造はできません。

【保守・点検に係る事項】

使用前に本体に穴あきや破れ、破損、加熱媒体の漏れ出しの異常がないか確認してください。異常を見つけた場合は使用を中止してください。

使用後廃棄する時には、お住いの市町村の廃棄方法に従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ファミリー・サービス・エイコー株式会社
住所: 〒380-0901 長野県長野市居町 43-1
電話: 026-259-3101

ご購入店の名称及び住所等