

類別:医療用品 04 整形用品

一般医療機器 一般的名称:医療ガーゼ (JMDNコード 13700000)

再使用禁止

ボディーフィックス・滅菌ガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
〔単回使用の製品であるため〕

【形状・構造及び原理等】

- 本品は綿 100% の平織りガーゼを折り畳んだ滅菌済みのものです。
- 本品にはサイズ違いがあります。
- 本品は白い布で臭い及び味はありません。
- 寸法
 - 滅菌ガーゼ L MEG110AY 800×600
 - 滅菌ガーゼ M MEG120AY 550×470
 - 滅菌ガーゼ S MEG130AY 480×370


【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とするガーゼから成る材料です。


【使用方法等】

本製品はボディーフィックス・スプリント (20B2X00028000008) 専用です。ボディーフィックス・スプリントについては、ボディーフィックス・スプリントの添付文書を参照ください。


- 負傷患部用のスプリント本体のサイズに合った滅菌ガーゼを面ファスナー部で固定する。

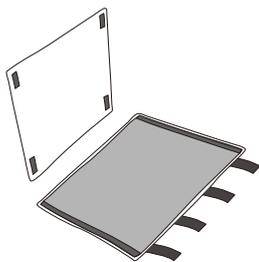

- 要救護者の負傷患部の下に当て患部を巻き付ける。

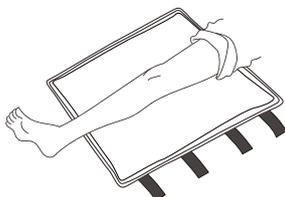

- 4ヶ所の面ファスナーでしっかり固定する。

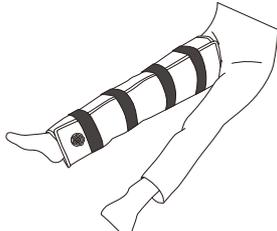

スプリントの詳細の使用方法は、ボディーフィックス・スプリントの添付文書を参照してください。

【使用上の注意】

- 本品は滅菌済み製品なので、使用直前に開封して使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 袋が開封、破損又は汚損、水濡れしている場合は、使用しないでください。
- 使用したものは、感染防止に留意し、医療廃棄物として衛生的に処理してください。
- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるので注意して使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - 直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿を避け清潔な場所に保管してください。
 - 小児の手の届かない場所に保管してください。
- 使用期限 (耐用期間)
 - 使用期限 [自己認証 (自社データによる)] を、袋または外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ファミリー・サービス・エイコー株式会社
住 所: 長野県長野市居町 43-1
電 話: 026-259-3101