

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材（JMDN:70757000）
プラスチックキャップ（PF φ 4.8）

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。
[「相互作用」の項参照]

【使用上の注意】

1. 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）
[併用禁忌・禁止]（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

***【形状・構造及び原理等】**

[形状]



径	PF φ 4.8
適応	Type I・II の φ 4.5 用
カラー	紫色

[材質] ポリアセタール

【使用目的又は効果】


本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる器具で、ラボサイドにおいてワックスアップを行う際に作業模型上のヘッドに装着して使用する。

***【使用方法等】**

1. 術前診査・フィクスチャ埋入・治癒期間終了後、ヘッドを装着し印象採得を行う。
2. 通法に従って作業用模型を製作する。
3. 作業模型上のヘッド（相当部）に本品を装着し、通法に従ってワックスアップを行う。
4. 補綴物を作製する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 使用前にあらかじめ口腔内に植立されているインプラントボディ（フィクスチャ）及びヘッド（アバットメント）のタイプとサイズを確認すること。
2. 本品はプラトンインプラント Type I・II 用である。埋入されているインプラント径により、以下のサイズを使用すること。
PF φ 4.4（インプラント径 φ 3.3、φ 3.7、φ 4.0 用）
PF φ 4.8（インプラント径 φ 4.5 用）
3. 本品は口腔内では使用しないこと。
4. 本品の作業模型上のヘッド（相当部）への装着時は、フィクスチャのマージン部及びヘッドのカット面が嵌合していることを確認すること。
5. 本品は FMヘッド（L）支台長 7.0 mm にあわせて設計されているため、FMヘッド（M）支台長 5.5 mm・FMヘッド（S）支台長 4.0 mm を使用している場合は、本品をカットする必要がある。

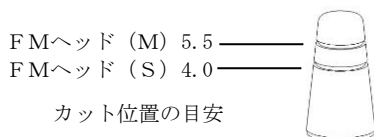

6. 本品は FMヘッド（支台長 4.0・5.5・7.0 mm）専用であり、他のヘッドには適応しないため注意すること。

***【取扱い上の注意】**

- ・直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708