

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (JMDN: 70757000)
プラトン ラボツールキット

【禁忌・禁止】


- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。
〔「相互作用」の項参照〕

****【取扱上の注意】**

1. 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

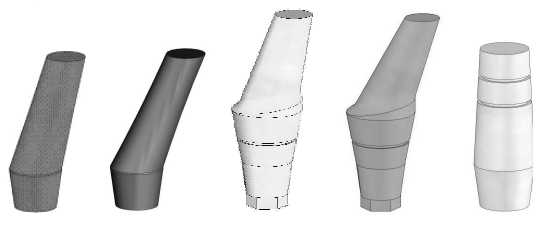

トランスファー
ゲージ

カラーコード	対応するヘッド
赤色	FMアングルヘッド 15° 1
青色	FMアングルヘッド 23° 1
黄色	AMアングルヘッド Pro15° 2
緑色	AMアングルヘッド Pro23° 2
乳白色	FMトランスファーヘッド 1
灰色	—

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
T E L 042-734-8088(代) F A X 042-737-6708

〔材質〕 ポリフェニルサルフォン樹脂

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる器具で、ラボサイドにおいて作業模型上のフィクスチャに装着し、アバットメントの選択に使用する。

****【使用方法等】**

1. 通法に従ってトランスファー印象を行い、作業用の模型を作製する。
2. 作業模型上で使用するアバットメントの選択を行う。
3. 専用グリップに選択をしたアバットメントを装着し、アバットメントの形成を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 本品は作業模型上でアバットメントの選択を行うためのキットであるため、上部構造の作製に使用しないこと。
(識別のためカラーコードを付与している。)
2. 本品は口腔内では使用しないこと。

****【使用上の注意】**

1. 相互作用 (他の医薬品・医療機器との併用に関すること)
〔「併用禁忌・禁止」併用しないこと〕

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するように設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないで下さい。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。