

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (JMDN: 70757000)
EL セレクションキット

***【禁忌・禁止】**

< 併用医療機器 >

・本品は「プラトンELインプラント」「EL - BiOインプラント」「Eight-Lobe Pro インプラント BiO」「Eight-Lobe Pro インプラント SAG」専用のため、他のインプラントには使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

< 使用方法 >

・ナローコネクション (NC) とレギュラーコネクション (RC) の混同に注意すること。
・本品は口腔内で使用しないこと。

****【使用目的又は効果】**

歯科インプラントの上部構造を作製するために用いる器具で、技工所において作業用模型内のレプリカ (アナログ) に装着し、アバットメントを選択するために使用する。

****【使用方法等】**

- (1) 通法に従いトランスファー印象を行い、作業用の模型を作製する。
- (2) 作業模型内のフィクスチャーレプリカ (13B1X10081000029) 又はエイトローブ Pro ラボアナログ (13B1X10081000052) にセレクションキットを装着し、上部構造に使用するアバットメントの種類・サイズを選択する。

***【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕



AM ストレートアバットメント φ4.5NC



AM アングルアバットメント φ4.5NC 15°



AM アングルアバットメント φ4.5NC 23°



AM ストレートアバットメント φ4.5RC



AM アングルアバットメント φ4.5RC 15°



AM アングルアバットメント φ4.5RC 23°



AM アングルアバットメント φ6.0RC 15°



AM アングルアバットメント φ6.0RC 23°

〔カラー〕

AM ストレートアバットメント φ4.5NC : 黄色
AM アングルアバットメント φ4.5NC 15° : 青色
AM アングルアバットメント φ4.5NC 23° : 水色
AM ストレートアバットメント φ4.5RC : 紫色
AM アングルアバットメント φ4.5RC 15° : 緑色
AM アングルアバットメント φ4.5RC 23° : 桃色
AM アングルアバットメント φ6.0RC 15° : 緑色
AM アングルアバットメント φ6.0RC 23° : 桃色

〔材質〕チタン合金 (Ti - 6Al - 4V 合金)

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ・本品の使用前に、組み合わせて使用する製品と適度な嵌合状態を保つことの確認を行うこと。

2) 相互作用 (他の医薬品・医療機器との併用に関すること)

〔「併用禁忌・禁止」併用しないこと〕

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するように設計されている。指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

***【取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町 56 番地 鶴川アカデメイアビル
TEL 042-734-8088 (代) FAX 042-737-6708