

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材（JMDN：70908000）
OTリーマーツール

【禁忌・禁止】

<併用医療機器>

- ・当社が指定する製品以外には使用しないこと。〔相互作用〕の項参照

<使用方法>

- ・ノーマルサイズとマイクロサイズの混同に注意すること。
- ・本品の形態変更や改造等はないこと。

2) 【相互作用】（他の医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は、当社が指定する製品と組み合わせで使用するよう設計されています。指定以外の製品とは組み合わせで使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず想定外の不具合が起こる可能性がある。

【形状・構造及び原理等】

〔構成〕

リーマーツール



（ノーマル）



（マイクロ）

リテンションテストツール



（ノーマル）



（マイクロ）

〔原材料〕

本 体	ステンレス鋼
ハンドル	アルミニウム

【使用目的又は効果】

本品は、義歯床内のリテンティブキャップ周囲をリーミングし、維持力を調整するために使用する器具である。

【使用方法等】

- （1）維持力の強いリテンティブキャップを使用する際に、リーマーツールを義歯床内のリテンティブキャップに挿入し、時計回りに数回転させることでキャップ周囲をリーミングし、維持力の調整を行う。
- （2）リテンションテストツールを義歯床内のリテンティブキャップに装着し、維持力を確認する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- （1）本品はOTキャップに使用する。
- （2）リーマーツールによる調整は数回転ごとに維持力を確認しながら行うこと。

【使用上の注意】**1) 重要な基本的注意**

- ・使用前・使用后に破損、キズ等の異常がないかを確認すること。これらがある場合には、使用を中止すること。

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照下さい。