

\* 2023年6月改訂  
2019年12月作成

(第2版)  
(第1版)

届出番号 14B1X10022000066

医01 エックス線フィルム  
一般医療機器 スクリーン型歯科画像診断用X線フィルム(40977000)

## 富士歯科用特殊X線フィルム

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

支持体に銀塩感光材料を塗布したもの。

#### 【動作原理】

フィルム乳剤中のハロゲン化銀に電磁波または光が照射されると、不可視な像が形成され、この像を現像することで、診断可能な可視画像となる。

### 【使用目的又は効果】

特に歯科X線装置で使用するためにサイズを定めて設計したスクリーン型X線フィルムをいう。

### 【使用方法等】

本フィルムを歯科用X線フィルムカセットに装填し、X線撮影を行った後現像処理を行う。

### 【使用上の注意】

1. 適切な安全光の下で開封すること。
2. 開封後は、遮光のため内袋に入れたまま保管すること。
3. フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
4. 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
5. 濡れた手による取扱いは避けること。
6. 二重露光は避けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

フィルムは直射日光を避けて、放射線やX線及び有害ガス(ホルマリンガス、硫化水素ガス等)の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。  
推奨温度・湿度は、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

#### 【有効期間】

それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：富士フィルム株式会社  
電話番号：0120-771669

販売業者：富士フィルムメディカル株式会社  
電話番号：0570-02-7007(ナビダイヤル)