

\*\*2025年10月改訂(第9版)  
\*2023年 1月改訂(第8版)

機械器具 6 呼吸補助器  
管理医療機器 呼吸回路セット (JMDNコード 70566000)\*  
「F&PシングルユースRT回路成人用」の付属品  
(RT024, RT913, RT914)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止[感染性物質の伝播、治療の中断、重篤な健康被害が発生したり死亡したりするおそれがあるため]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状


ドライライン延長キット

Part No. RT024



構成品: (1)ドライチューブ ×1 本  
(2)アダプター 22 mmオス-22 mmオス ×1 個

アダプター 22 mmオス-22mm メス アングル Part No. RT913

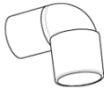

アダプター 22 mmオス-22mm オス

Part No. RT914



本品には天然ゴムラテックスを使用していない。

\* 2. 仕様 (RT024)

	圧縮容量	177 mL
**	コンプライアンス (60cmH <sub>2</sub> O, BTPS, 不確かさ 0.03 mL/cmH <sub>2</sub> O)	0.52±0.13 mL/cmH <sub>2</sub> O
	流量抵抗 (30L/分, 不確かさ 0.03 cmH <sub>2</sub> O)	0.03±0.01 cmH <sub>2</sub> O
	最大稼働圧	加湿チャンバーの添付文書を参照
	長さ	0.5 m
**	ガスリーク(@60cmH <sub>2</sub> O)	<3 mL/分
	最小内径	19 mm

3. 動作原理

使用目的に合わせ、構成部品を選択して人工呼吸器等のガス供給源および加湿加湿器と組み合わせて使用することにより、患者にガスを供給する。

【使用目的又は効果】

- 人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

- ドライチューブを人工呼吸器と加湿チャンバーに接続する。
- 必要に応じて人工呼吸器との接続にアダプターもしくはフィルターを使用する。

使用方法等に関連する使用上の注意

呼吸回路の添付文書の注意事項に従って使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 本品を洗浄、滅菌したり、アルコールを含む化学薬品、洗浄剤、手指消毒剤などを本品に接触させたりしないこと。

- 呼吸回路を引っ張ったり、ねじったり、潰したり、締めつけたりしないこと[呼吸回路に穴が開いたり、損傷するおそれがあるため]。
- Part number RT024 は、人工呼吸器から加湿加湿器まで標準的なドライラインが届かない場合に、ドライラインの長さを延長するために使用すること。

不具合・有害事象

- 重大な不具合  
回路接続部の緩み・外れ、閉塞、ガスリーク、破損
- \*\* 重大な有害事象  
低酸素血症、低酸素症、皮膚熱傷、気道熱傷、気道損傷、肺損傷、電撃傷、筋骨格損傷、低体温症
- その他の有害事象  
皮膚の発赤、不快感、感染症、アレルギー反応

【保管方法及び有効期間等】

- 適切な保管方法で保管する時、製造日より5年(箱のラベルおよび直接の被包記載の製造年月日を参照)。
- 本品は7日間を限度に新品と交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**Fisher & Paykel**  
**HEALTHCARE**

製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社  
電話番号 03-5117-7110

外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited  
フィッシャー・アンド・パイクル・ヘルスケア・リミテッド  
ニュージーランド

Fisher & Paykel Healthcare S.A. de C.V.

フィッシャー・アンド・パイクル・ヘルスケア・エス・エー・デ・シー・ブイ  
メキシコ合衆国

【販売業者(販売店)】