

**2017年 8月改訂(第3版・新記載要領に基づく改訂)

*2016年 8月22日改訂(第2版)

機械器具 6 呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット(JMDNコード 37234000)

「F&P ICONオート」の付属品

送気チューブ(900HC221)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (JIS T 7201-2-1 に適合)

Part No.900HC221 送気チューブ (アダプタ Part No.900HC010 付属)



Part No.900HC010 アダプタ



2. 動作原理

フィルターを通して室内空気を取り込み、ブロウにより送気空気に圧力を発生させる。CPAP 装置本体のヒータープレートでチャンパー内の蒸留水を加熱して送気空気に適度な湿度を与え、送気チューブ、マスクを通じて患者に加圧加湿空気を供給して閉塞性無呼吸患者の上気道の開存性を確保する。装置は患者の呼吸圧を監視しており、供給圧を変化させる AUTO モードで機能させることができる。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻マスクを介して持続的気道陽圧(CPAP)を供給することにより、閉塞性無呼吸の患者の上気道の開存性を保持し、睡眠中の咽頭部軟組織の弛緩による気道閉塞を減少させ、睡眠中の無呼吸を防ぐために使用する。

**【使用方法等】

1. 送気チューブを CPAP 装置本体後部のエルボーに接続する。必要に応じてアダプタを使用する。
2. 送気チューブのもう一方の端をマスクなどの患者インターフェース (JIS T 7201-2-1 に適合するコネクタを持つもの) に接続する。必要に応じてアダプタを用いて接続すること。

使用方法等に関連する使用上の注意

使用する製品の添付文書及び取扱説明書に従って使用すること。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品の開口部に異物を落したり挿入したりしないこと。
2. 本品は、患者 1 名に限り使用できる。

【保守・点検に係る事項】

使用後のクリーニング (毎回)

1. 本品を中性洗剤で洗う。中性洗剤には 10 分以上浸さないようにし、きれいな水ですすぐ。
2. 本品の両端を下に向けて吊るし、乾燥させる。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社

電話番号 03-5117-7110

外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited

フィッシャー・アンド・パイクール・ヘルスケア・リミテッド
ニュージーランド

[販売業者(販売店)]



取扱説明書を必ずご参照ください。