

**2017年 8月改訂(第4版・新記載要領の基づく改訂)

*2016年 5月26日改訂(第3版)


機械器具 6 呼吸補助器
高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット(JMDNコード 37234000)

「F & P ICONオート」の付属品

加湿チャンバー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

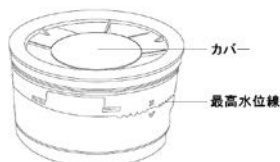

Part No.9001CON200

** 本品には天然ゴムラテックスを使用していない。

2. 動作原理


フィルターを通して室内空気を取り込み、ブロウにより送気空気に圧力を発生させる。CPAP 装置本体のヒータープレートでチャンバー内の蒸留水を加熱して送気空気に適度な湿度を与え、送気チューブ、マスクを通じて患者に加圧加湿空気を供給して閉塞性無呼吸患者の上気道の開存性を確保する。装置は患者の呼吸圧を監視しており、供給圧を変化させる AUTO モードで機能させることができる。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻マスクを介して持続的気道陽圧(CPAP)を供給することにより、閉塞性無呼吸の患者の上気道の開存性を保持し、睡眠中の咽頭部軟組織の弛緩による気道閉塞を減少させ、睡眠中の無呼吸を防ぐために使用する。

**【使用方法等】

1. 使用前に本品を温水ですすぎ洗いを。

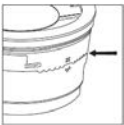2.  最高水位線まで、水を充填する。
本品に熱湯は入れないこと。

3. 水位レベルが最高水位線を超えていないことを、必ず確認する。

4.  本品を CPAP 装置本体に入れ直す際は、カバーの上に記されている矢印が、本体後部のエルボ側に向いていることを確認する。5.  CPAP 装置付属の取扱説明書を参照して、操作を行う。

使用方法等に関連する使用上の注意

F & P ICONオートの添付文書及び取扱説明書に従って使用すること。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品のベースプレートおよび CPAP 装置本体のヒータープレートは、高温になることがあるので触れないこと[火傷するおそれがあるため]。

**【保管方法及び有効期間等】

使用期間

本品の消毒を 20 回行った場合には、新品と交換することを推奨する。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用後のクリーニング(毎回)

(1) 本品に残った水を捨てる。
(2) 本品を中性洗剤で洗浄し、十分にすすいだ後、乾燥させる。

2. 一週間毎のクリーニング

(1) 本品に残った水を捨てる。
(2) 酢酸溶液(酢と水を 1:2 の割合で攪拌したもの)に本品を 10 分間浸し、十分にすすいだ後、乾燥させる。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社

電話番号 03-5117-7110

外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited

フィッシャー・アンド・パイクール・ヘルスケア・リミテッド

ニュージーランド

[販売業者(販売店)]



取扱説明書を必ずご参照ください。