

\*\*2017年 8月改訂(第4版・新記載要領に基づく改訂)

\*2016年 8月22日改訂(第3版)

機械器具 6 呼吸補助器  
 高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット(JMDNコード 37234000)

## 「F & P ICONオート」の付属品

アウトレットシール

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



Part No.9001CON206

\*\* 本品には天然ゴムラテックスを使用していない。

#### 2. 動作原理

フィルターを通して室内空気を取り込み、ブロウにより送気空気に圧力を発生させる。CPAP 装置本体のヒータープレートでチャンバー内の蒸留水を加温して送気空気に適度な湿度を与え、送気チューブ、マスクを通じて患者に加圧加湿空気を供給して閉塞性無呼吸患者の上気道の開閉性を確保する。装置は患者の呼吸圧を監視しており、供給圧を変化させる AUTO モードで機能させることができる。

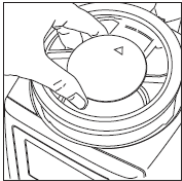
### 【使用目的又は効果】

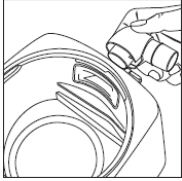
本品は、鼻マスクを介して持続的気道陽圧(CPAP)を供給することにより、閉塞性無呼吸の患者の上気道の開閉性を保持し、睡眠中の咽頭部軟組織の弛緩による気道閉塞を減少させ、睡眠中の無呼吸を防ぐために使用する。

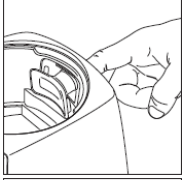
### \*\*【使用方法等】

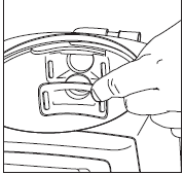
操作方法の詳細については、CPAP 装置付属の取扱説明書を参照してください。

#### 取り外し/取り付け方法

- 

CPAP 装置から加湿チャンバーを取り外す。
- 

CPAP 装置後部からエルボーを取り外す。
- 

エルボーを取り外し、CPAP 装置の後部に指を差し込み、指を内側に押し、本品を外す。
- 

CPAP 装置後部にエルボーを取り付けてから、洗浄後または新しいアウトレットシールを CPAP 装置内部のくぼみに取り付ける。

### 使用方法等に関連する使用上の注意

F & P ICONオートの添付文書及び取扱説明書に従って使用すること。

### \*\*【保管方法・有効期間等】

#### 使用期間

本品の消毒を 20 回行った場合には、新品と交換することを推奨する。

### \*\*【保守・点検に係る事項】

本品を洗浄する場合は中性洗剤を使用し、その後きれいな水ですすぐ。中性洗剤には 10 分以上浸さないこと。洗浄後は完全に乾燥したことを確認してから使用すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**Fisher & Paykel**  
**HEALTHCARE**

#### 製造販売業者

Fisher & Paykel Healthcare 株式会社  
 電話番号 03-5117-7110

#### 外国製造業者

Fisher & Paykel Healthcare Limited  
 フィッシャー・アンド・パイクел・ヘルスケア・リミテッド  
 ニュージーランド

#### [販売業者(販売店)]

取扱説明書を必ずご参照ください。