

\*\*2017年 8月改訂(第4版・新記載要領に基づく改訂)

\*2016年 3月18日改訂(第3版)


機械器具 6 呼吸補助器  
 高度管理医療機器 持続的自動気道陽圧ユニット(JMDNコード 37234000)  
**「F & P ICONオート」の付属品**  
 送気チューブ(900ICON208)

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状

Part No.900ICON208

加熱送気チューブ

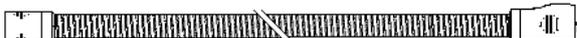

(患者インターフェースとの接続部分は JIS T 7201-2-1 に適合)

## 2. 動作原理


フィルターを通して室内空気を取り込み、ブロウにより送気空気に圧力を発生させる。CPAP 装置本体のヒータープレートでチャンパー内の蒸留水を加熱して送気空気に適度な湿度を与え、送気チューブ、マスクを通じて患者に加圧加湿空気を供給して閉塞性無呼吸患者の上気道の開閉性を確保する。装置は患者の呼吸圧を監視しており、供給圧を変化させる AUTO モードで機能させることができる。

**【使用目的又は効果】**

本品は、鼻マスクを介して持続的気道陽圧(CPAP)を供給することにより、閉塞性無呼吸の患者の上気道の開閉性を保持し、睡眠中の咽頭部軟組織の弛緩による気道閉塞を減少させ、睡眠中の無呼吸を防ぐために使用する。


**\*\* 【使用方法等】**

## 1.

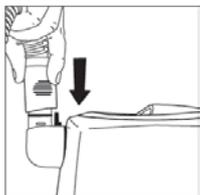

本品を CPAP 装置本体後部のエルボーに差し込むとともに、ヒーターワイヤソケットに確実に接続する。

## 2.

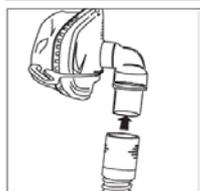

本品を CPAP 装置本体後部のエルボーに取り付けた後、もう一端のアダプタを、マスクなどの患者インターフェース(JIS T 7201-2-1 に適合するコネクタを持つもの)に接続する。

**使用方法等に関連する使用上の注意**

F & P ICONオートの添付文書及び取扱説明書に従って使用すること。

**\*\* 【使用上の注意】****重要な基本的注意**

1. 本品の開口部に異物を落としたり挿入したりしないこと。
2. 送気チューブが患者の皮膚に触れたままにならないようにすること。

**\*\* 【保管方法及び有効期間等】****使用期間**

本品の消毒を 20 回行った場合には、新品と交換することを推奨する。

**\*\* 【保守・点検に係る事項】**

1. 本品を中性洗剤で洗う。中性洗剤には 10 分以上浸さないようにし、きれいな水ですすぐ。
2. 本品の両端を下に向けて吊るし、乾燥させる。

**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**Fisher & Paykel**  
**HEALTHCARE**

**製造販売業者**

Fisher &amp; Paykel Healthcare 株式会社

電話番号 03-5117-7110

**外国製造業者**

Fisher &amp; Paykel Healthcare Limited

フィッシャー・アンド・パイクル・ヘルスケア・リミテッド

ニュージーランド

**[販売業者(販売店)]**

取扱説明書を必ずご参照ください。