


器64 歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN31848000
プローブ

【形状・構造及び原理等】

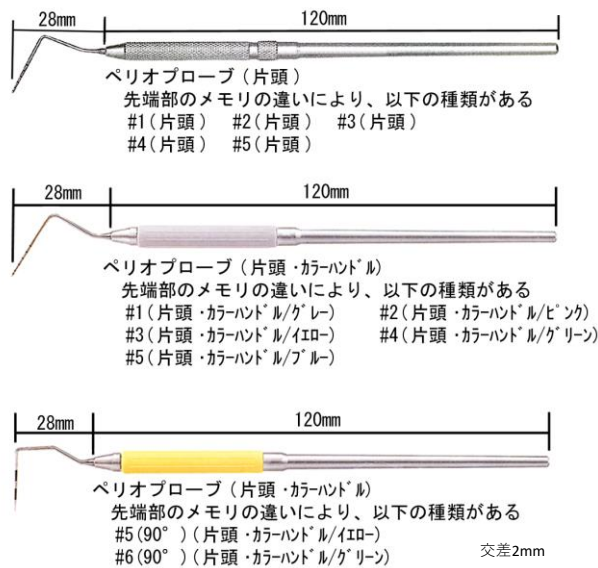

【使用目的、効能又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定する
歯科手用器具。

【操作方法又は使用方法】

棒状のハンドルを持ち、先端部に付いているメモリで歯周ポケットの
深さを測定する。作業部分は多種の形状があるので、術者は
探查に対し最適と思われる作業部形状を有する製品を
使い分けて診察を行う。

【使用上の注意】

- 1) **使用前の注意:** 使用前に必ず洗浄・オートクレーブ滅菌
(132℃10分)をする事。
- 2) **ステンレス鋼使用:** 先端の素材はステンレス鋼である。
ステンレスは鉄と比べ錆びにくい金属であるが、使用方法、
環境等によっては腐食することがあるので以下の使用上の
注意を守る事。
- 3) **シリコン使用:**
本品は柄の一部にシリコンを採用しているため、他の器具
(鋭利な箇所を持つ器具)と一緒に取り扱う際には、鋭利な
箇所がシリコンに傷をついたり刺さらないよう十分注意する事。
シリコン部に傷がついた際には使用を中止すること。
- 4) **取り扱いについて:** 器具の寿命を著しく低下させるので、粗
雑な取り扱いはしない事。
- 5) **目的外使用の禁止:** 使用目的(医療行為)以外の目的で
使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので
使用時に必要以上の力(応力)を加えない事。
- 6) **塩素系・ヨウ素系消毒剤の使用について:** 塩素系及び
ヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着し
た際はできるだけ早めに洗浄する事。
- 7) **加熱の禁止:** 本品は直接火炎にさらさない事。
加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) **保管上の注意:**
 - ・化学薬品と一緒に収納・保管しない事。
 - ・滅菌後は水気の無い安全な場所で常温で保管する事。
- 2) **保管者の限定:** 本品は歯科の従事者以外が触れないように
適切に保管・管理する事。

【保守・点検に係る事項】

- 1) **使用前・使用後の点検:** 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、
変色、腐食、稼働部の動き等に異常がないか確認する事。
これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により
金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。
- 2) **家庭用洗剤の使用禁止:** 家庭用洗剤は金属を腐食させる
事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗
浄剤を使用する事。
- 3) **機能水の使用禁止:** 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食
させる事があるので、使用しない事。
- 4) **洗浄、消毒、滅菌上の注意:**
 - ・次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しな
い事。塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩
素酸ナトリウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グル
コン酸クロルヘキシジン
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書又は取り扱い説明
書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっ
ては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・使用後は、できるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて器
具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、職業
感染防止の為に洗浄・消毒する事。
 - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用する事。
水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する
事がある。
 - ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に
注意する事。135℃より高温の乾燥は、器具の鈍り、変形、
変色、劣化等の原因となることがある。
 - ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させ
てから保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、
錆び、シミ等の原因となることがある。
 - ・洗剤の残留がないよう充分にすすぎをする事。
 - ・洗浄装置(超音波洗浄器等)での洗浄を行わない事。
器械的な衝撃(超音波振動等)が原因で着色が剥離する
事がある。
 - ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌し
ない事。
- 5) **クレンザー(磨き粉)、金属ウール、金ブラシの使用禁止:**
錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・
金ブラシは使用しない事。

【包装】

紙袋に各種1個入包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名	フジデンタル株式会社
住所	東京都北区中里2-14-8
TEL	03-6903-7972

製造業者名	フジデンタル株式会社 13BZ201150
住所	東京都北区中里2-14-8

