

器39 歯科技工用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000

技工用プライヤー

【形状・構造及び原理等】

原理 手動式 作業部 柄部

【使用目的、効能又は効果】

金属片又はクラスプライヤーを屈曲又は角度付与する為に用いる
歯科用器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

回転軸のある2枚の作業部を使用しワイヤー及び金属片の屈曲
角度付与に使用する。

【使用上の注意】

- 1) ステンレス素材を使用しているが使用方法、環境等によ
っては腐食することがあるので以下の使用上の注意を守る事。
- 2) **取り扱いについて**: 器具の寿命を著しく低下させるので、粗
雑な取り扱いはしない事。
- 3) **目的外使用の禁止**: 使用目的(医療行為)以外の目的で
使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので
使用時に必要以上の力(応力)を加えない事。
許容範囲を超えるサイズのワイヤー等を屈曲切断には使用
しない事。
- 4) **加熱の禁止**: 本品は直接火炎にさらさない事。
加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) **保管上の注意**:
・化学薬品と一緒に収納・保管しない事。
滅菌後は水気の無い安全な場所に常温で保管する事。
- 2) **保管者の限定**: 本品は歯科の従事者以外が触れないように
適切に保管・管理する事。

【保守・点検に係る事項】

- 1) **使用前・使用後の点検**: 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、
変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。
これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により
金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。
- 2) **家庭用洗剤の使用禁止**: 家庭用洗剤は金属を腐食させる
事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗
浄剤を使用する事。
- 3) **機能水の使用禁止**: 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食
させる事があるので、使用しない事。

【保守・点検に係る事項】

- 1) **使用前・使用後の点検**: 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、
変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。
これらがある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により
金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。
- 2) **家庭用洗剤の使用禁止**: 家庭用洗剤は金属を腐食させる
事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗
浄剤を使用する事。
- 3) **機能水の使用禁止**: 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食
させる事があるので、使用しない事。
- 4) **洗浄の注意**:
・洗浄後は水分を除去し、充分乾燥させてから保管する事。
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の
原因となることがある。
- 5) **クレンザー(磨き粉)、金属ウール、金ブラシの使用禁止**:
錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・
金ブラシは使用しない事。

【包装】

各種1個入包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 フジデンタル株式会社
住所 東京都北区中里2-14-8
TEL 03-6903-7972

製造業者名 フジデンタル株式会社 13BZ201150
住所 東京都北区中里2-14-8