

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN コード 35761000

ヘイギアーズ 光照射ユニット

【警告】

<使用方法>

- ・本体内部に直接手を触れたり分解しないこと。[高圧電流が流れており、感電する恐れがある。]
- ・ランプ交換用扉を開ける前には、機器の電源コードをプラグから抜くこと。[電気ショックを避けるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観



- ① メイン スイッチ（背面）
- ② 電源接続コネクタ（背面）
- ③ フタ
- ④ 液晶タッチパネル
- ⑤ 調節ツマミ
- ⑥ チャンバー
- ⑦ 冷却ファン

2. 機器寸法等

高さ：260 mm
幅：410 mm
奥行：340 mm
重量：約 17 kg

3. 原理

本品は、光を発生させ光触媒型レジンを重ね硬化させる。

4. 性能

メインスペクトル：380-386 nm

【使用目的又は効果】

歯科技工用重合装置

【使用方法等】

1. 取付・設置

- 1) 機器の取り付け・設置は専門の担当者（当社者又は当社指定の業者）が行うこと。
- 2) 背面パネルは壁面から 10cm 以上離し、冷却ファンの通気性を確保すること。
- 3) 装置底面からの排気を妨げないように、通気性を保って設置すること。

2. 使用方法

補綴物を重合コンテナ中央部に入れ、光重合を行う。

機器の詳細は操作方法については、付属の取扱説明書をご使用前に必ず読み、その方法に従ってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 連続商社の際、本体が高温になるためやけどに注意する。
- 2) ランプが熱い状態でランプを交換しないこと。メインスイッチを ON にしたまま 30 分程度放熱し、熱が冷めてから行う。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

取扱説明書に従い、適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い、日常の保守・点検を励行する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：フォレストudent・ジャパン株式会社

住所：〒107-0052

東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2F

電話番号：03-6277-6980

FAX 番号：03-3568-8864

製造業者：GUANGZHOU HEYGEARS IMC. INC

（ヘイギアーズ社；中国）

取扱説明書等を必ずご参照ください