

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN コード 35761000  
**Form Cure（フォーム キュア）**

**【警告】**

- ・本体内部に直接手を触れたり分解しないこと。
- ・ランプ交換時には、機器の電源コードをプラグから抜くこと。

**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

外観



2. 機器寸法等

寸法：262 x 262 x 340 mm

重量：5.6 kg

3. 原理

歯科用の光硬化性樹脂を光と加熱により重合硬化させる。

4. 性能

LED 波長：405 nm

**【使用目的又は効果】**

歯科技工用重合装置

**【使用方法】**

- 1) 本品が水平な場所に置かれ電源等が適切な状態になっていることを確認する。
- 2) 3Dプリンターで製作された造形物の洗浄および乾燥後、造形物をターンテーブルにセットする。
- 3) カバーを閉め、硬化時間と温度を設定して、重合を開始する。
- 4) 効果完了後に造形物を取り出し、必要な処理を行う。

**【使用上の注意】**

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ①水や液体のかからない場所で使用する。
- ②温湿度やほこり等、周囲の環境の影響を受けない清潔な場所で使用する。
- ③傾斜、振動、衝撃などのない水平で安定した場所で使用する。
- ④電源、アースなどが適切な状態である。
- ⑤本体やカバーに亀裂や割れを生じさせない。
- ⑥異音や動作異常が発生した場合には作業を中断する。

**【保管方法及び有効期間等】**

〔保管方法〕

- ・高温、直射日光、火気を避け室内で保管する。
- ・暗所で保管する。
- ・湿気、腐食性ガスのない場所に保管する。
- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：フォレストudent・ジャパン株式会社

住所：〒107-0052

東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2F

電話番号：03-6277-6980

FAX 番号：03-3568-8864

製造業者：Formlab, Inc.（アメリカ）