

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN コード 34713000

INTEWARE アライナートリマー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 仕様

寸法	450 x 380 x 600 mm
重量	40 kg
電圧	AC110-220 V
軸数	3
切削精度	±0.05mm

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計 (CAD) 又はコンピュータ支援製造 (CAM) に用いる。

【使用方法等】

- 1) 機器の電源を入れる。
- 2) 作製物をテーブルに固定する。
- 3) 切削パラメーターを入力する。
- 4) スタートボタンを押し、切削を開始する。
- 5) 切削が終了したら、ストップボタンを押し、作製物を取外す。
- 6) 機器の電源を切り、電源コードを抜く。

【使用上の注意】

- 1) 訓練を受け、使用法を理解したものが使用すること。
- 2) 作動時は扉を閉じ、内部に触れないこと。
- 3) 目的用途以外には使用しないこと。
- 4) 使用しない時は電源コンセントを抜くこと。
- 5) 機器を分解、修理、改造しないこと。
- 6) 異常発生又は故障の際は、有資格者・専門家以外は修理を行わないこと。
- 7) 濡れた手でプラグ及び電源スイッチに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
2. 振動、衝撃を受けない平たんで安定した場所に保管する。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
4. 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：フォレストアデント・ジャパン株式会社

住所：〒107-0052

東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2F

電話番号：03-6277-6980

FAX 番号：03-3568-8864

製造業者：Inteware Co., Ltd. (台湾)