

医療用品 0 4 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 JMDN コード 70914000


Taglus ウルトラ

【禁忌・禁止】

- ・再使用しないこと。
- ・成形品は 30 日を超えて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1 形状：無色透明な 3 層構造の円盤状熱可塑性プラスチック材料

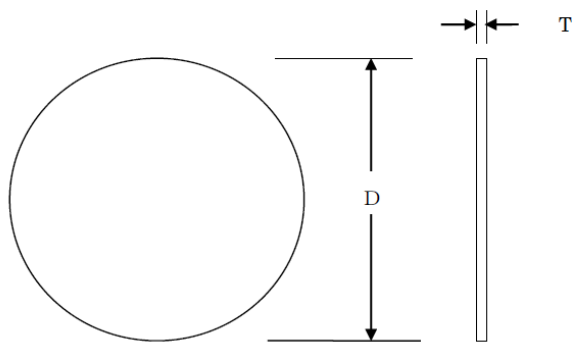

D（直径）：120 mm ～ 125 mm
T（厚さ）：0.75 mm 及び 1.00mm

2 材質：（外層）ポリエチレンテレフタレート
（内層）ポリウレタン

【使用目的又は効果】

本品は歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。ただし、使用期間が 30 日を超えないものに限る。

【使用方法等】

1. 患者から採取、セットアップされた歯牙模型を歯科技工用成型器の所定の場所にセットする。
2. 歯牙に接触するよう本品を成型器の所定の位置にセットする。使用する歯科技工用成型器の指示された成型条件に従い、本品を加熱して軟化させる。
3. 加熱した本品を歯牙模型の上に被せ、成型器の操作方法に従い、吸引又は加圧により成型を行う。
4. 成型された本品が十分に冷却されたことを確認し、歯牙模型より取り外す。
5. 患者が快適に装着できるよう余分な部分を削って仕上げる。
6. 医師の指示により適切な時間患者に装着する。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温、直射日光、火気を避け、30℃未満の室内で保管する。
- ・暗所で保管する。
- ・湿気、腐食性ガスのない場所に保管する。
- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。

〔有効期間〕

本材容器に記載の使用期限までに使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び住所等】

製造販売業者：フォレストudent・ジャパン株式会社

住所：〒107-0052

東京都港区赤坂 2-10-12 生駒硝子ビル 2F

電話番号：03-6277-6980 FAX 番号：03-3568-8864

製造業者：Vedia Solutions Division Of Laxmi Dental Limited
(インド)