

* 2022年 7月改訂(第3版)
2017年10月改訂(第2版)

医療機器承認番号 21800BZX10024000

器06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ 70569000

シリコンコネクティングチューブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止
 - 2) 酸素療法中は、本品に火気を近づけないこと。

【形状、構造及び原理等】

本品は、シリコンゴム製の接続用チューブである。

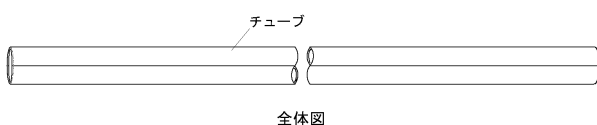

〈材質〉

各部の名称	原材料
チューブ	シリコンゴム

本品はラテックスフリーである。

【使用目的又は効果】

酸素療法に際して、酸素濃縮式供給装置と酸素吸入用マスクまたは酸素補給用鼻カニューレを接続するための接続用チューブとして使用する。

【使用方法等】

1. 操作方法

本品はディスポーザブル製品である。1人の患者のみに使用し、再使用はしない。
2. 一般的使用方法
 - 1) チューブの末端を、酸素濃縮式供給装置や酸素吸入用マスク、酸素補給用鼻カニューレ等のコネクタへ接続する。
3. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) 使用前に、チューブに閉塞がないこと、並びに酸素濃縮式供給装置、酸素吸入用マスクまたは酸素補給用鼻カニューレと、確実に接続できることを確認すること。
 - 2) 本品を使用する際は、複数本での連結使用(コネクタ等による中間接続)は行わないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 酸素療法中は、酸素濃縮式供給装置、酸素吸入用マスクまたは酸素補給用鼻カニューレとの接続状態、並びに本品に屈曲等による閉塞が生じていないことを、常に確認すること。[接続部の外れ(ゆるみ)、屈曲等が生じると、酸素が流れなくなる可能性がある]
- * 2) 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。(自己認証による)

2. 不具合・有害事象

本品の使用に際し、以下のような不具合・有害事象が生じる可能性がある。

- 1) 重大な不具合
 - ・ 屈曲等によるチューブ閉塞
- 2) 重大な有害事象
 - ・ 低酸素血症

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
2. 有効期間
 - 1) 開封前の製品の使用期限は、製品ラベルに記載。[自己認証(当社データ)による]
 - 2) 開封後は、できるだけ速やかに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 富士システムズ株式会社
TEL 03-5689-1927