

器 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード 70682000

イントラオーラルチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者 : Premium Plus (Dongguan) Limited
(国名：中華人民共和国)

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔種類及び色〕

スモール（イエロー）
ラージ（ホワイト）

〔材質〕

ポリプロピレン

〔梱包〕

100 本

【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和する器具の先端に装着し、歯科材料を注入する為に用いる器具をいう。

【使用方法等】

別売りの歯科用練成器具（ミキシングチップ）の先端に装着し、歯科材料を注入する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ イントラオーラルチップが歯科用練成器具（ミキシングチップ）に確実に装着されていることを確認してから、歯科材料の注入を行うこと。
- ・ 先端が尖形なので、取扱いに注意すること。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・ 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。