

ディスポーザブル排唾管

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・意識のない患者等、口腔内の異物に対して強く噛み込むおそれのある患者には使用しないこと。（本品を強く噛み込んだ場合、先端のチップが外れ、誤飲につながるおそれがあります。）

【形状・構造及び原理等】

サライバエジェクター

[形状]



接続部外径：約 6.5 mm

材質：ポリ塩化ビニル、鉄線

サライバエジェクター ソフトチップタイプ

[形状]



接続部外径：約 6.5 mm

材質：（チップ）熱可塑性エラストマー
（チューブ）ポリ塩化ビニル、鉄線

[梱包]

100 本

【使用目的又は効果】

歯科用の吸引装置に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

- ・使用目的に応じた角度にチューブを曲げる。
- ・吸引装置の管（内径 6.5 mm）に差し込む。
- ・患者の口腔内の水分や切削片を除去する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・不適切な吸引をしないよう注意して操作すること。
- ・排唾管アダプター（届出番号 27B2X00268000037）を使用し、内径の異なる吸引装置に接続することもできる。

【使用上の注意】

- ・チップが外れ、誤飲につながるおそれがあるため、意識のない患者等、口腔内の異物に対し強く噛み込むおそれのある患者には使用しないこと。
- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、摩耗、腐食、変形、チップの脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱い扱うこと。
- ・チップが外れ、誤飲につながるおそれがあるため、本品先端部に過度な力を加えないこと。
- ・使用中に抜けないよう、吸引装置の管にしっかり差し込むこと。

- ・排唾管アダプターを使用する場合は、確実に接続できることを確認の上使用すること。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び使用期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Premium Plus (Dongguan) Limited
（国名：中華人民共和国）