

スケーラーブラシホルダー

【形状・構造及び原理等】

形状



(ブラシ接続部)

(ハンドピース接続部)

材質：ステンレススチール

【梱包】

1セット(スケーラーブラシホルダー1個/ レンチ1本)

【使用目的または効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

- (1) 本品と適合する歯科用エアースケーラーブラシをブラシ接続部に装着する。
- (2) エアースケーラーハンドピースに装着する。
- (3) 歯科用エアースケーラーの説明書に従い使用する。
- (4) 使用後は適切に洗浄、滅菌する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) ブラシ接続部にはエアースケーラーブラシを手動で、ハンドピース接続部にはエアースケーラーハンドピースを付属のレンチを使用して確実に装着し、把持できることを確認すること。
- (2) 予め患者の口腔外で空振動させ、振動、音、温度(発熱)等に異常を感じたら使用を中止すること。
- (3) 振動中、スケーラーブラシホルダーに長時間触れたりつまんだりしないこと。
- (4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

*【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検を行うこと。
- (2) 破損、摩耗、腐食、変形等の損傷や劣化が確認された場合は、使用時に破折の恐れがあるため使用しないこと。
- (3) 本品を改造しないこと。
- (4) 落下等により破損の恐れがある場合には、使用しないこと。
- (5) 破折の恐れがあるため、エアースケーラーハンドピースに設定以上のエアを供給しないこと。
- (6) 破折による誤飲を防ぐため、ラバーダムシートを使用する等の適切な処置のもと使用すること。
- (7) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分(水漏れ)、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧(物理的負荷)及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- (3) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 機器に付着した血液、体液、組織等は、乾燥し、固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。
- (2) 洗浄剤は洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (3) 高圧蒸気滅菌すること。詳細は高圧蒸気滅菌装置の説明書に従うこと。例：120℃で15分又は135℃で5分
- (4) 洗浄、消毒装置あるいは高圧蒸気滅菌装置を使用する際は、機器どうしを接触させないこと。
- (5) 乾燥させてから保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Premium Plus (Dongguan) Limited
(国名：中華人民共和国)