

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ (35768000)

ジーシー PTC ソフトブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

⑤本品を使用する際には目の損傷を防ぐために、術者及び患者は保護メガネなどを使用すること。

【形状・構造及び原理等】・形状：歯面清掃用ブラシ



・構造

全体形状	毛の形状	毛の材質	ホルダー部
スクリュー	フラット	ナイロン	真鍮

・原理：本品は、ブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯面の清掃・研磨を行うことができる。

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具をいう。

【使用方法等】

- 1) PTCソフトブラシをスクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースに取り付けます。スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースがない場合は、別売のPTCマンドレルをPTCブラシのネジ部分にはめ込み、通常のラッチコントラハンドピースに装着して使用してください。
- 2) PTCソフトブラシにPTCペースト（歯面研磨用ペースト）を適量塗布し、3000回転数／分以下の回転数で歯面研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品はハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実にねじこみ、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 2) 本品をPTCマンドレルに装着して使用する場合は、本品をマンドレルに最後まで確実にねじ込んだ後、ハンドピースメーカーの指示に従って最後まで確実に挿入し、半チャックになっていないことを確認してから使用すること。
- 3) 使用前に確実に口腔外で予備回転を行ない、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に使用すること）
本品、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①モーターを逆回転（左回転）させるとハンドピースから外れる恐れがあるため、必ず正回転（右回転）で使用する。
 - ②本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ③本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ④破損や口腔内を傷つける原因になるので、使用回転数を超えた回転数、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 直射日光を避け、室温にて保管する。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- 3) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管する。
- 4) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しない。
- 5) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させない。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 : 06-6845-0066
製造業者 : Premium Plus (Dongguan) Limited
(国名：中華人民共和国)

発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480