

プロフィールブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

【形状】



【種類】

タイプ	ブラシ材質	形状	写真
CA	ナイロン	フラット	①
		テーパー	②
スクリュー	ナイロン	フラット	③
		テーパー	④
CA ジュニア	ナイロン / 豚毛	9mm (ブラシヘッド寸法)	⑤
ス ク リ ュ ー ジュニア	ナイロン	9mm (ブラシヘッド寸法)	⑥
CA ジュニア ミニ	ナイロン / 豚毛	7mm (ブラシヘッド寸法)	⑦
ス ク リ ュ ー ジュニア ミニ	ナイロン	7mm (ブラシヘッド寸法)	⑧
CA マイクロ	ナイロン	フラット	⑨
スクリュー マイクロ	ナイロン	フラット	⑩
スナップオン	ナイロン	フラット	⑪
		テーパー	⑫
アングル	ナイロン	フラット	⑬
		テーパー	⑭

【ブラシ固さ】 レギュラー(白)/ ソフト(クリア)/ エクストラソフト(黄)

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師が歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

- (1) 直接あるいは別売りのマンドレルに接続して、ハンドピースに装着する。
- (2) 歯面研磨材を用いて清掃、研磨する。
- (3) 回転数：1,500～3,000 rpm

「使用方法に関連する使用上の注意」

- (1) 本品を接続する歯科用ハンドピースは、以下の内容に適合する機器に限定する。
 - － 本品の軸又はスクリュー、あるいは本品を接続するマンドレルを確実に把持することが可能である。
 - － 使用中、規定する回転数での制御が可能である。
- (2) 接続する機器の取扱説明書等に従って軸を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- (3) スクリュータイプは確実に奥までねじを締め、動かないことを確認すること。
スナップオンタイプはマンドレルに確実に装着すること。
- (4) 予め患者の口腔外で回転させ、振れがないことを確認すること。
- (5) 破損や過剰な発熱の原因となるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- (6) 上記の回転数を超えて使用しないこと。
- (7) スクリュータイプはモーターを逆（左）回転させると外れてしまうため、使用に際しては必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【使用上の注意】

- (1) 作業時には、目の損傷及び飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マスク等を着用すること。
- (2) 使用後は感染防止に留意し、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。
- (3) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- (3) 接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
 電話番号 06-6845-0066

製造業者：Premium Plus (Dongguan) Limited
 (国名：中華人民共和国)